

Руководство по эксплуатации

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (АДАПТЕР) OMRON AC ADAPTER-S

Предназначен для питания
от электрической сети напряжением 220В
автоматических тонометров

OMRON



CS
СИЭС МЕДИКА

Эксклюзивный дистрибьютор и импортер
медицинской техники OMRON в России

Благодарим Вас за покупку!

Адаптер соответствует всем требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ:

Сертификат соответствия: № РОСС УР.МЕ20.В07045

от 16.06.2010 г. Срок действия до 16.06.2013 г.

ВНИИНМАШ. Орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования (ОС "Сертинформ ВНИИНМАШ")

Соответствуют требованиям: ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2008 (СИСПР 14-1-2005), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2: 2005), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005)

Срок службы – не менее 7 лет.

Правила пользования

1. Соедините штекер блока питания с гнездом внешнего питания измерителя артериального давления.
2. Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней электрической сети.

Меры предосторожности

1. Не допускайте сгибов, переломов шнура адаптера.
2. Не допускайте проникновения влаги в корпус адаптера.
3. Не производите самостоятельную разборку или ремонт адаптера.
4. Не оставляйте адаптер включенным в сеть на длительное время.

В случае обнаружения дефекта, обращайтесь в гарантийную мастерскую.

Технические характеристики

МодельOMRON AC ADAPTER-S

Электрическая сеть100-240 В, 50/60Гц/0,12А

Выходное напряжение 6V DC/500mA

Комплект поставки

Блок питания	— 1 шт.
Упаковочная коробка	— 1 шт.
Руководство по эксплуатации	— 1 шт.

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

1. Адаптер сетевой модель OMRON AC ADAPTER-S предназначен только для электропитания автоматических осциллометрических измерителей артериального давления OMRON и не может использоваться для электропитания других электрических приборов.

2. В соответствии с ГОСТ 13109-67 допускается отклонение напряжения электросети в диапазоне $\pm 5\%$. Кроме того, низкое качество электроэнергии определяет нахождение рядом с Вами импульсивных потребителей электроэнергии (электросварка, мощное зарядное устройство, электротранспорт), которые могут вызвать импульсные перенапряжения на входе адаптера и выход адаптера из строя.

3. Если исключить несанкционированное и ненадлежащее использование адаптера и обеспечить необходимое качество электроэнергии, адаптер сетевой модель OMRON AC ADAPTER-S показывает долговременную и надежную работу, полностью исключающую его выход из строя на протяжении всего срока службы.

Если условиями электроснабжения не выполняется пункт 2, мы рекомендуем:

- обратиться в Энергонадзор Вашего района, который должен обеспечивать качество электроэнергии потребителю в соответствии с ГОСТом.
- если Энергонадзор не может обеспечить необходимое качество электроэнергии, необходимо обеспечить питание адаптера через дополнительный сетевой стабилизатор на выходное напряжение $220\text{ В} \pm 5\%$.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону бесплатной горячей линии по России: **8-800-555-00-80** или посетите наш интернет сайт по адресу: **www.csmedica.ru**

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем авторизованном сервисном центре, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание приборов OMRON, по телефону горячей линии.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

OMRON Healthcare Co., Ltd. (Japan) (ОМРОН Хелскэа Ко., Лтд. (Япония))
24, Yamanoouchi-Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084, Japan
(24, Яманучи-Яманошита-чо, Юкио-ку, Киото, 615-0084, Япония)
на производственном подразделении MITSUMI PHILIPPINES INC,
Luzon Avenue, Bataan Economic Zone Mariveles, Bataan, Philippines
(МИТСУМИ ФИЛИППИНЭС АйЭнСи, Лузон Авеню, Батаан Экономик
Зон Маривелес, Филиппины)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ:

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН Хэлскэа Европа Б.В.)
Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, THE NETHERLANDS
(Круизвег 577, 2132 НА Хуфддорп, Нидерланды)
www.omron-healthcare.com

ЗАО «КомплектСервис» – эксклюзивный дистрибьютор
и импортер медицинской техники OMRON в России

По вопросам реализации и закупок обращайтесь по адресу:
125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4
Тел/факс: (495) 987-18-92, 987-18-93

По вопросам сервиса обращайтесь по адресу:
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел/факс: (495) 221-73-45 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: info@csmedica.ru, service@csmedica.ru (сервисный центр)
www.csmedica.ru

Гарантийный талон

Дата продажи _____

Штамп магазина

Подпись продавца _____

Изделие во всех режимах работы
Проверялось в присутствии покупателя

Подпись покупателя _____

СРОК ГАРАНТИИ 24 МЕСЯЦА