

MEDISANA®

RU Весы электронные
индивидуальные PSW




Art. 40450

CE

Инструкция по применению

Внимательно ознакомиться!

Прибор и управление

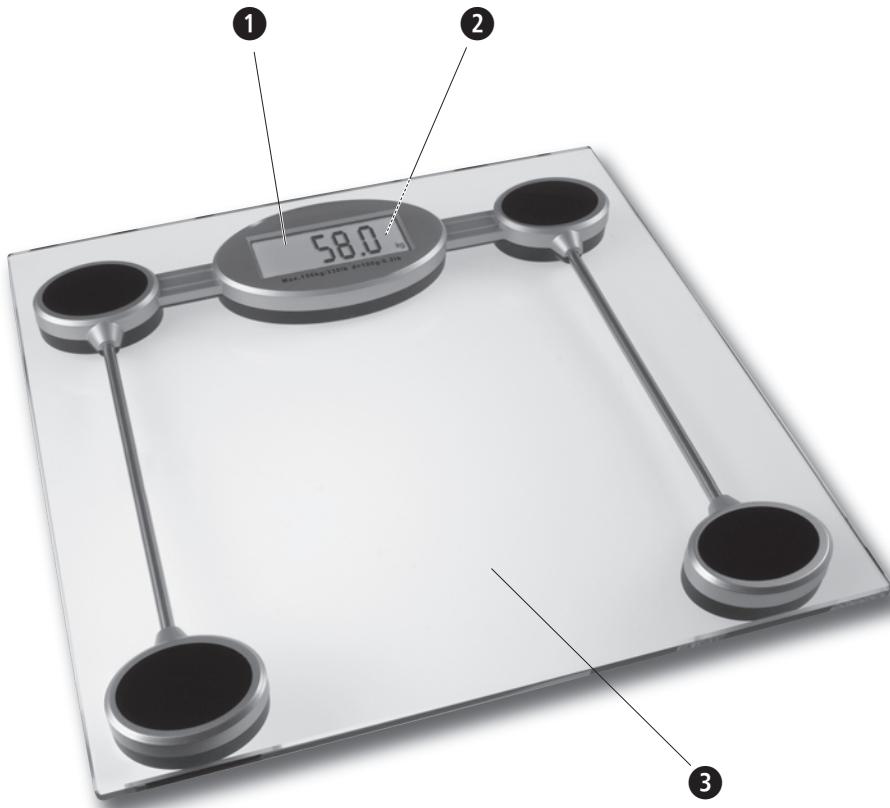

MEDISANA®

RU

- ①** Дисплей
- ②** Отсек для батареек
с переключателем
килограмм (KG)
фунт (LB)
стоун (ST)
- ③** Платформа

RU

Инструкция по применению

1	Указания по безопасности	1
2	Полезные сведения	3
3	Применение	4
4	Разное	6
5	Гарантия	7



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!

Прежде, чем начать пользование прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

Пояснение символов



Данная инструкция по применению относится к данному прибору. Она содержит важную информацию о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции может приводить к тяжелым травмам или повреждению прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.



УКАЗАНИЕ

Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.



Номер LOT



Производитель

RU

1 Указания по безопасности



Указания по безопасности

- Любое лечение, а также диета для снижения или повышения веса требует квалифицированной консультации соответствующих специалистов (врача, диетолога). Определение индивидуального веса при помощи данных весов будет хорошей ориентировочной базой для такого курса лечения.



- Внимание! Соблюдайте равновесие, используя весы!**

Никогда не ставьте весы на неровную поверхность.

Никогда не вставайте только на угол весов.

Не вставайте только на одну сторону весов либо на их край.



- Внимание! Не поскользнитесь на весах!**

Никогда не вставайте на весы мокрыми ногами.

Никогда не вставайте на весы в надетых носках.

- Используйте данный прибор только по его прямому назначению согласно инструкции по эксплуатации.
- При использовании весов не по назначению прилагаемая гарантия будет аннулирована.
- Весы предназначены для домашнего пользования. Они не предназначены для профессионального применения в больницах и прочих медицинских учреждениях.
- Не возобновляйте пользование прибором, если его функции нарушены, а также, если он получил повреждения от удара, упал в воду или сломался.
- Максимальный допустимый вес для данных весов – 150 кг, 330 фунтов/24 st. Не перегружайте весы.



- Поставьте весы на твердую, ровную поверхность. Мягкие, неровные поверхности непригодны для взвешивания и ведут к неверным результатам измерения.



- Поместите весы в помещении с комнатной температурой и нормальной влажностью.



- Предохраняйте весы от попадания на них воды.

- Бережно обращайтесь с весами. Оберегайте их от ударов и сотрясений. Не роняйте весы.

- Не разбирайте весы, иначе гарантия будет аннулирована. Кроме элемента питания данный прибор не содержит деталей, которые могут быть заменены либо отремонтированы потребителем.
- В случае поломки прибора не ремонтируйте его самостоятельно, т. к. при этом гарантия будет полностью аннулирована. Ремонт должен проводиться только имеющими на это соответствующую лицензию станциями техобслуживания.
- Если Вы намереваетесь на продолжительное время прекратить использование прибора, удалите из него элементы питания.

Благодарность

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой! Купив индивидуальные электронные весы **PSW**, Вы стали владельцем высококачественного продукта от **MEDISANA**. Прибор предназначен для измерения веса людей. Для достижения желаемого успеха и обеспечения длительного срока службы весов **MEDISANA PSW** мы рекомендуем внимательно прочесть приведенные ниже указания по применению и уходу.

**2.1
Комплектация и упаковка**

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и отошлите его в сервисный центр.

В комплект входят:

- 1 **MEDISANA** Весы электронные индивидуальные **PSW**
- 1 литиевая батарейка на 3 В типа CR2032
- 1 инструкция по применению

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям. Опасность удушения!

**2.2
Характеристики прибора**

- Высококачественное безопасное стекло
- Современная сенсорная технология
- Диапазон измерения - 150 кг, 330 фунтов или 24 st
- Шаг 100 г, 0,2 фунта или 1/4 st
- Единица измерения кг или фунты (- / ST)
- Прямое измерения веса тела
- Удобство пользования
- Информативный ЖК-дисплей
- В комплекте 1 источник питания 3 В типа CR2032

**2.3
Условия для достижения правильных результатов измерения**

Точные результаты измерения можно получить только при определенных условиях:

- Всегда измеряйте свой вес при постоянных условиях.
- Желательно взвешиваться в одно и то же время суток.
- Стойте прямо и спокойно.
- Лучше всего выполнять измерение по утрам, после принятия душа или ванны, хорошо высушив ноги.

При последовательном выполнении результаты измерений могут стать надежным средством контроля за изменением веса.

RU

3 Применение

MEDISANA®

3.1

Элемент питания установка/замена

В новые весы уже вложена плоская батарейка (типа CR2032). Прежде, чем начать пользоваться весами, Вы должны удалить изолирующую полоску из отсека для батарейки ② на нижней стороне прибора. Замените батарейку, если на дисплее ① появляется пиктограмма замены батарейки «LO» или если на дисплее ничего не появляется после включения прибора. Для этого откройте отсек для батареек ② на нижней стороне прибора и вложите плоскую батарейку (типа CR2032). Следите за правильностью расположения полюсов (указано в отсеке для батарейки; положительный полюс обращен к крышке). Закройте отсек для батареек ②.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С БАТАРЕЙКАМИ

- Батарейки не разбирать!
- При необходимости, перед установкой батареек очистить контакты в приборе и на батарейках!
- Разряженные батарейки немедленно удалить из прибора!
- Повышенная опасность вытекания электролита - избегайте попадания на кожу, слизистые оболочки и в глаза! В случае попадания электролита сразу промойте пострадавшие участки достаточным количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу!
- Если батарейка случайно была проглочена, немедленно обратитесь к врачу!
- Всегда заменяйте все батарейки одновременно!
- Используйте только батарейки одного типа, не комбинируйте батарейки различных типов или использованные батарейки с новыми!
- Правильно вставляйте батарейки, учитывайте полярность!
- Отсек для батареек должен быть всегда тщательно закрыт!
- Если прибор долго не используется, удалите из него батарейки!
- Не допускать попадания батареек в руки детей!
- Не заряжать батарейки заново! Существует опасность взрыва!
- Не закорачивать! Существует опасность взрыва!
- Не бросать в огонь! Существует опасность взрыва!
- Храните неиспользованные батарейки в упаковке. Во избежание короткого замыкания не храните их вблизи металлических предметов!
- Не выбрасывайте использованные батарейки в бытовой мусор, а только в специальные отходы или в контейнеры для сбора батареек, имеющиеся в магазинах!

3.2

Изменение единицы веса

Вы можете измерять вес в килограммах (kg), стонах (st) или фунтах (lb). Откройте отсек для батареек ② на нижней стороне прибора и настройте небольшим переключателем требуемую единицу измерения веса. Закройте отсек для батареек.

3.4 Взвешивание

1. Установите весы на прочное основание. Все четыре ножки должны иметь контакт с полом. Неровный пол отрицательно сказывается на точности измерений.
2. Всегда измеряйте свой вес на одних и тех же весах, в одном и том же месте и в одно и то же время. Взвешивайтесь без одежды, до еды, лучше всего утром до завтрака.
3. Включите весы легким нажатием ноги вблизи дисплея ①. Подождите несколько секунд. На дисплее коротко появляется 4 цифры «8», а затем «0.0 kg».



УКАЗАНИЕ

Становитесь на весы только после появления на дисплее индикации «0.0 kg». При неверном использовании показываются неверные значения веса либо они вообще не показываются.

4. Осторожно встаньте на весы. Аккуратно и ровно расположите ступни на платформе ③ весов. Не двигайтесь. Измеряется и указывается значение Вашего веса.
5. Как только Вы сходите с весов, они автоматически выключаются.



УКАЗАНИЕ

Если Вы включили весы нажатием ноги, но не взвесились во время появления на дисплее индикации «0.0 kg», весы автоматически выключаются приблизительно через 6 секунд.

3.5 Сообщения об ошибках

На дисплее могут показываться следующие сообщения о неисправностях:

Err

Весы перегружены.

Lo

Батарейки разряжены и должны быть заменены.

Если весы не функционируют должным образом, то прежде, чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее:

- Проверьте, правильно ли вложена батарейка.
- Проверьте, выбрана ли правильная единица измерения веса.
- Проверьте, стоят ли весы свободно на твердом, ровном покрытии. Они не должны соприкасаться со стеной или иным предметом.
- Повторите взвешивание, следя за тем, чтобы не встать на весы раньше, чем на дисплее появится сообщение «0.0 kg».

4.1**Очистка и уход**

- Выньте батарейки перед чисткой прибора.
- Не пользуйтесь агрессивными чистящими средствами и грубыми щетками.
- Очищайте весы только мягкой, слегка влажной тряпкой. Не используйте острые предметы или спирт.
- Вода не должна попадать внутрь. Не погружайте прибор в воду. Используйте прибор, только когда он полностью сухой.
- Не подвергайте прибор действию прямых солнечных лучей, оберегайте его от грязи и влаги.
- Не храните весы в вертикальном положении и вынимайте из них батарейку, если Вы долгое время не будете ими пользоваться. В противном случае грозит опасность вытекания электролита из батарейки.

4.2**Указание по утилизации**

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. Выньте батарейки перед утилизацией прибора. Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с бытовыми отходами, а сдавайте их как специальные отходы или в пункты приема батареек на предприятиях специализированной торговли! По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные предприятия или к дилеру.

4.3**Технические характеристики**

Название и модель	: MEDISANA Весы электронные индивидуальные PSW
Электропитание	: 3 В=, 1 батарейки по 3 В плоский литиевый элемент питания типа CR2032
Диапазон измерения	: - 150 кг, 330 фунтов или 24 st
Шаг	: 100 г, 0,2 фунта или 1/4 st
Автомат. отключение	: прибл. через 6 секунд
Размеры (Д x Ш x В)	: прибл. 30 см x 30 см x 3,3 см
Вес	: прибл. 1,85 кг
№ арт.	: 40450
EAN-номер	: 4015588 40450 4



В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.