



APEXMED
Aquasath
**КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-х ХОДОВОЙ
С ГИДРОФИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

Предназначен для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций

- изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом и гидрофильным полимером
- общая длина катетера 400 мм
- закрытый конец, 2 боковых отверстия
- объем баллона 30 см³
- стерилизован оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- только для одноразового использования
- не нуждается в лубрикантах (смазке)
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- содержит латекс, который может вызывать аллергические реакции
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- утилизация и обработка катетера в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Надеть перчатки
2. Открыть блистерную упаковку и извлечь катетер в индивидуальной упаковке
3. Заполнить индивидуальную упаковку с катетером стерильной водой. Под воздействие воды поверхность катетера становится влажной и скользкой.
4. Катетер должен находиться в воде не менее 30 секунд. Жесткость катетера зависит от температуры воды. В холодной воде катетер более жесткий, а в теплой более мягкий.
5. По истечении 30 секунд достать катетер из упаковки.
6. Взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу (4-5 см)
7. Свободный конец катетера захватить между 4-5 пальцами правой руки
8. Обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
9. Свободный конец катетера опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить

По шкале Шарьера Ch/Fr	Внутренний диаметр I.D (мм)	Внешний диаметр O.D (мм)	Объем баллона, мл/куб.см	Цвет
12	2,8	4,0	30	белый
14	3,3	4,7	30	зеленый
16	3,8	5,3	30	оранжевый
18	4,5	6,0	30	красный
20	5,1	6,7	30	желтый
22	5,6	7,3	30	фиолетовый
24	6,2	8,0	30	синий

нить к мочеприемнику

10. Ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
11. Шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема используя физиологический раствор или воздух
12. По окончании выведения мочи шприцем убрать воздух или физраствор из фиксирующего баллона
13. Извлечь катетер, надавливая при этом на надлобковую область ладонью левой руки
14. Промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном
15. Утилизировать катетер в установленном порядке

ВНИМАНИЕ!

При затруднении извлечения катетера вследствие невозможности аспирации воздуха или физиологического раствора из баллона катетера необходимо произвести пункцию иглой, сделать микронадрез ниже уровня клапана катетера или полностью отрезать клапан. Это способствует снижению давления в фиксирующем баллоне и позволяет беспрепятственно извлечь катетер.

REF. Каталожный номер

MFD Дата производства

EXP Использовать до

LOT Номер партии



Для одноразового использования

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC

Не токсично

PYROGEN FREE

Апирогенно

PTHALATE FREE

Без фталатов



Смотрите инструкцию

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2008/02858 от 19.11.2008



Производитель:
"Алексмед Интернэшнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,
Амстердам, Нидерланды

