

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ С КОНЧИКОМ ТИМАННА 2-х ходовой (Ch 14 - Ch 20)

Предназначен для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций

- изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом
- общая длина катетера: 400 мм
- закрытый конец, 2 боковых отверстия
- объем баллона 30 см³
- стерилизован оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- только для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- содержит латекс, который может вызывать аллергические реакции
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- утилизация и обработка катетера в установленном порядке


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- надеть перчатки
- взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу (4-5 см)
- свободный конец катетера захватить между 4-5 пальцами правой руки
- смазать вводимый конец катетера стерильным глицерином или стерильным вазелиновым маслом

По шкале Шарьера Ch/Fr	Внутренний диаметр I.D (мм)	Внешний диаметр O.D (мм)	Объем баллона, мл/куб.см	Цвет
14	3,3	4,7	30	зеленый
16	3,8	5,3	30	оранжевый
18	4,5	6	30	красный
20	5,1	6,7	30	желтый

- обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
- свободный конец опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
- шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема используя физиологический раствор или воздух
- по окончании выведения мочи шприцем убрать воздух или физраствор из фиксирующего баллона
- катетер извлечь, нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки
- промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном

ВНИМАНИЕ! При затруднении извлечения катетера вследствие невозможности аспирации воздуха или физиологического раствора из баллона катетера необходимо произвести пункцию иглой, сделать микронадрез ниже уровня клапана катетера или полностью отрезать клапан. Это способствует снижению давления в фиксирующем баллоне, и позволяют беспрепятственно извлечь катетер

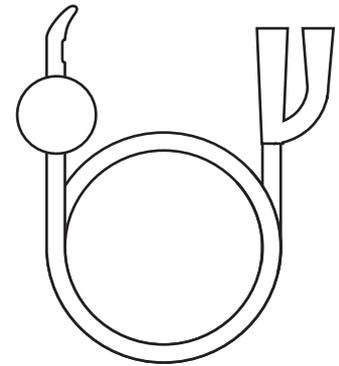

REF. Каталогный номер
 MFD Дата производства
 EXP Использовать до
 LOT Номер партии



Для одноразового применения

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC

Не токсично

PYROGEN FREE

Апирогенно

PHTHALATE FREE

Без фталатов



Смотрите инструкцию

Регистрационное удостоверение
 № ФСЗ 2008/02858 от 19.11.2008

Производитель:
 "Алексмед Интернэшнл Б.В."
 Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,
 Амстердам, Нидерланды



1023