

# КАТЕТЕР НЕЛАТОНА С КОНЧИКОМ ТИМАННА

Предназначен для катетеризации мочевого пузыря при наличии obstructивных заболеваний мочеиспускательного канала, других препятствий для свободного введения катетера со стандартным цилиндрическим кончиком

- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
- длина 40±2 см, закрытый изогнутый конец, 2 боковых отверстия
- стерилизован оксидом этилена

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45 °С
- обработка и утилизация катетера в установленном порядке

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- надеть перчатки
- свободный конец катетера захватить между 4-5 пальцами правой руки, смочить вводимый конец

- катетера в стерильном глицерине или стерильном вазелиновом масле
- обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
- свободный конец отпустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- соблюдая правила антисептики, с учетом направления изгиба дистального кончика катетера ТИМАННА, ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
- закрепить катетер с помощью лейкопластыря или тесьмы
- по окончании выведения мочи катетер извлечь, нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки
- промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке

По шкале Шарьера Ch/Fr	Внутренний диаметр I.D (мм)	Внешний диаметр O.D (мм)	Цвет
10	2,3	3,3	черный
12	2,8	4,0	белый
14	3,3	4,7	зеленый
16	3,8	5,3	оранжевый
18	4,5	6,0	красный
20	5,1	6,7	желтый
22	5,6	7,3	синий

REF.	Каталожный номер
MFD	Дата производства
EXP	Использовать до
LOT	Номер партии

**STERILE EO**

Стерилизовано оксидом этилена

**NON TOXIC  
PYROGEN FREE  
PHTHALATE FREE**

 Не токсично  
Апирогенно  
Без фталатов


Для одноразового использования



Смотрите инструкцию

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02858 от 19.11.2008

Производитель: "Апексмед Интернэшнл Б.В."

Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды



IM15



1023