

# МОЧЕПРИЕМНИК ПРИКРОВАТНЫЙ 1000 мл, 2000 мл

**Предназначен для сбора мочи**

- изготовлен из прозрачного поливинилхлорида
- длина трубы  $90\pm2$  см
- снабжен клапаном против обратного тока мочи и сливным клапаном
- наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника
- цена деления: мочеприемника на 1000 мл - 50 мл,  
мочеприемника на 2000 мл - 100 мл (боковая градуировка от 25 мл до 100 мл)

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- не подлежит дезинфекции и стерилизации с целью повторного использования
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация мочеприемника в установленном порядке

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- закрыть выпускной клапан
- закрепить мочеприемник на кровати или стойке, используя уплотненные кольца, с помощью специальных крючков, фиксирующей ленты или иных приспособлений
- снять колпачек с конического коннектора на трубке
- присоединить коннектор к катетеру
- при наполнении мешка измерить объем мочи, открыть выпускной клапан, сдвинув его вниз
- после опорожнения мешка вновь закрыть выпускной клапан
- обработка и утилизация в установленном порядке

**ВНИМАНИЕ!** Не оставлять прикрепленным мочеприемник более 1 часа.

В случае, если не удалось собрать мочу в течение 1 часа, снять мочеприемник и использовать новый

REF. Каталожный номер



Для одноразового использования

MFD Дата производства



Смотрите инструкцию

EXP Использовать до

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

LOT Номер партии

Рег. уд. № ФСЗ 2008/02860 от 20.11.2008

Производитель: "Алексмед Интернэшнл Б.В."

Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды



ИМ15



1023