

МОЧЕПРИЕМНИК НОСИМЫЙ «ЛЮКС» 750 мл.

Предназначен для сбора мочи.

Обеспечивает беспрепятственное перемещение

- для использования у мужчин и у женщин
- изготовлен из прозрачного мягкого поливинилхлорида
- длина трубки 28±2 см и снабжен клапаном против обратного тока мочи и сливным Т-образным клапаном
- объем 750 мл. Цена деления 50 мл
- наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника
- эластичные ленты для крепления мочеприемника к бедру
- плотность прилегания регулируется специальными кнопками застежками
- стерилизован оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- не подлежит дезинфекции и стерилизации с целью повторного использования
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка утилизация в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- закрыть выпускной клапан, сдвинув в направлении «Закрыть»
- закрепить мочеприемник на бедре: верхнюю эластичную ленту закрепить в верхнем отделе бедра или за пояс, а нижнюю ленту закрепить в нижней части бедра. Плотность прилегания эластичных лент регулируется специальными кнопками
- снять колпачок с конического коннектора на трубке
- присоединить коннектор к катетеру
- при наполнении мешка открыть выпускной клапан, сдвинув в направлении «Открыть»
- подлежит обработке и утилизации в установленном порядке



REF. Каталожный номер

MFD Дата производства

EXP Использовать до

LOT Номер партии



Для одноразового использования



Смотрите инструкцию

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

Рег. уд. № ФСЗ 2009/04330 от 14.05.2009

Производитель: Нинбо Цзяндун Грейткэа Интернэшнл Трэйд Ко., Лтд.
Адрес: 14-8, № 717 Чжунсин Роуд, Цзяндун, Нинбо, Китай
По заказу «Апексмед Интернэшнл Б.В.», Нидерланды"



IM15

1023