

МОЧЕПРИЕМНИК ПРИКРОВАТНЫЙ «ЛЮКС» 2000 мл

**Предназначен для сбора мочи в стационарных
и амбулаторных условиях**


- изготовлен из прозрачного поливинилхлорида
- длина трубки 90±2 см
- снабжен клапаном против обратного тока мочи
- Т-образный сливной клапан
- дополнительный порт приводного коннектора
- встроенная система крепления к кровати
- цена деления - 100 мл. Боковая градуировка от 25мл до 150мл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- стерильно
- не подлежит дезинфекции и стерилизации с целью повторного использования
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от 30 до +45°C
- обработка и утилизация в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Закрывать сливной Т-образный клапан, сдвинув его в направлении надписи «закрывать» нанесенной на нижней части мешка мочеприемника
2. Закрепить мочеприемник на кровати или стойке, используя встроенную систему крепления
3. Присоединить приводной коннектор к катетеру
4. При наполнении мешка измерить объем мочи, открыть сливной Т-образный клапан, сдвинув его в направлении надписи «открывать» нанесенной на нижней части мешка мочеприемника
5. После опорожнения мешка вновь закрыть Т-образный сливной клапан
6. При взятии мочи на анализ из дополнительного порта приводного коннектора обработать зону самозатягивающегося клапана антисептиком и произвести забор мочи с помощью шприца либо другого устройства
7. Обработка и утилизация в установленном порядке

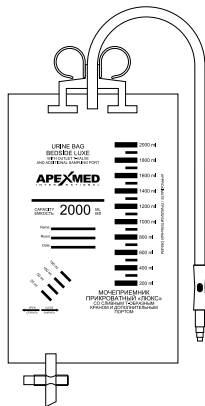

REF. Каталожный номер
MFD Дата производства
EXP Использовать до
LOT Номер партии



Для одноразового использования



Смотрите инструкцию

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

Рег. уд. № ФСЗ 2008/02860 от 20.11.2008

Производитель: "Апексмед Интернэшнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды



IM15



1023