

ГРЕЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

B.Well®

WP-250

**СУПЕРКОМФОРТ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР**

Безопасное использование
благодаря термостату
и защите от короткого
замыкания



З А Б О Т А И Т Е П Л О

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой электрической грелки компании B.Well! Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Компания B.Well гарантирует, что данный прибор произведен из высококачественных материалов и соответствует действующим национальным и международным стандартам безопасности.

Прежде чем пользоваться прибором, внимательно изучите инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока службы прибора.

Электрогрелка WP-250 — это прибор для местного воздействия на какую-либо часть организма сухим теплом.

Электрогрелка имеет 3 (три) температурных режима.

- Уровень «1» соответствует минимальному нагреву,
- уровень «2» — умеренному,
- а уровень «3» — максимальному нагреву.

Три температурных режима позволяют выбрать нужный уровень температуры.

Описание ручного регулятора температуры

- Световой индикатор температурного режима
- Переключатель температурных режимов
- Тумблер ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ



Использование по назначению:

Данная электрогрелка предназначена для обогрева человеческого тела. С ее помощью можно целенаправленно применять тепло. Тепло интенсифицирует кровообращение и расслабляет мускулатуру. Данная электрогрелка не предназначена для использования в медицинских целях в лечебных учреждениях или для коммерческого использования.

Противопоказания для применения электрогрелок:

Использование электрогрелок противопоказано при злокачественных и доброкачественных опухолях, активных формах туберкулеза, болезнях крови, заболеваниях сердечно-сосудистой системы с декомпенсацией кровообращения, острых воспалительных процессах и др.

ВАЖНО: *Запрещается использовать грелку на воспаленных, поврежденных или опухших частях тела. В случае сомнений перед использованием проконсультируйтесь с врачом. Если установлен кардиостимулятор, перед использованием данной электрогрелки проконсультируйтесь с врачом и изготовителем кардиостимулятора.*

Функциональные особенности электрогрелки WP-250

Компактная электрогрелка 30 x 40 см

Простое управление ручным регулятором со световым индикатором работы

Три температурных режима

Равномерное прогревание поверхности

Наличие термостата

Защита от короткого замыкания

Автоматическое выключение через 90 минут непрерывной работы

Съемный мягкий чехол с возможностью стирки

Технические характеристики

220-240В ~ 50-60Гц ~ 45Вт

Класс защиты от поражения электрическим током (II класс)

Три температурных режима

Состав: внутренний чехол — 100% ПВХ,
тканевый чехол — 100% флис

Инструкция по применению:

Для того чтобы грелка служила Вам долго и безупречно, и во избежание риска, связанного с неправильным использованием грелки, мы настоятельно рекомендуем Вам придерживаться мер предосторожности и правил использования прибора.

Меры предосторожности:


- Каждый раз перед использованием внимательно осматривайте внутренний чехол из ПВХ и провод на предмет повреждений или износа. Не используйте грелку при обнаружении признаков повреждения или износа на внутреннем чехле. В этом случае обратитесь в центр технического обслуживания.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими или умственными расстройствами, с пониженной чувствительностью или не обладающими необходимыми знаниями и навыками, либо прибор может использоваться ими под наблюдением или руководством лица, отвечающего за их безопасность.
- Грелка не предназначена для людей с ограниченными двигательными способностями, людей с нарушениями кровообращения. Грелка также не предназначена для использования во время сна.
- Температура прогрева участка тела, на котором расположена грелка, зависит от температуры окружающей среды и плотности прилегания грелки к телу.
- Дети могут использовать грелку только под наблюдением взрослых, чтобы исключить её использование в игровых целях.
- Если грелка влажная, не используйте ее — помните, что она подключается к электрической сети.
- Не садитесь на грелку, не сминаяте и не сгибайте её (располагайте грелку поверх места, к которому необходимо приложить тепло, но не под него).
- Не используйте грелку без тканевого чехла, не тяните грелку за шнур и не используйте шнур в качестве ручки.
- Не используйте булавки, иголки или другие острые металлические предметы для того, чтобы закрепить грелку в желаемом положении.

Во избежание ожогов, соблюдайте следующие правила:

- Не используйте грелку во время сна и не накрывайте её одеялом (можно получить ожоги независимо от установленной температуры).
- Не наносите кремы или мази – тепловое воздействие может оказаться выше рекомендуемого.
- Постоянно проверяйте состояние кожи под грелкой, чтобы избежать появления ожогов и волдырей.

Правила использования:

- Вставьте вилку в розетку сети питания с напряжением 220 В переменного тока.
- Включите прибор, сдвинув вперед тумблер ВКЛ/ВЫКЛ. (рис. 1)

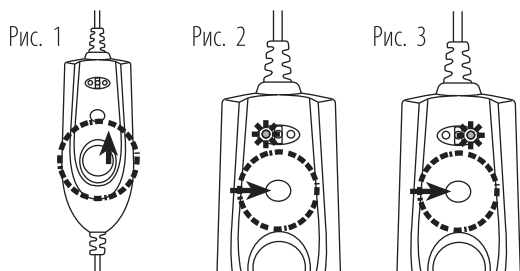

- Нажмите на переключатель температурных режимов (рис. 2), после чего устройство начнет работать при минимальном уровне нагрева «1» (зеленый цвет индикатора). Если световой индикатор температурного режима не горит, это означает, что устройство не работает.
- Каждое повторное нажатие увеличивает уровень нагрева, пока не будет достигнут максимальный уровень нагрева 3 (красный цвет индикатора). (рис. 3)
- При работе прибора на максимальном уровне нагрева «3» (красный свет индикатора) повторное нажатие переключателя температурных режимов приведет к тому, что устройство переходит на уровень «1» (зеленый свет индикатора).
- В качестве меры безопасности, устройство запрограммировано на автоматическое выключение после 90 минут непрерывного использования. При автоотключении прибора световые индикаторы уровней нагрева начинают мигать. Если прибор отключается таким способом, сдвиньте тумблер ВКЛ/ВЫКЛ назад и еще раз вперед для его повторного включения.

После каждого использования:

- Выключите прибор с помощью тумблера ВКЛ/ВЫКЛ
- Отключите прибор из сети электропитания.

Очистка и техническое обслуживание:

- Перед очисткой электрогрелки всегда отключайте шнур питания от розетки.
- Перед стиркой не забудьте вынуть грелку из чехла.
- Снятый с грелки тканевый чехол может быть подвергнут ручной или машинной деликатной стирке при температуре не выше 30°C с нейтральными моющими средствами. Использовать бережный отжим для тонких вещей. Не сушить чехол в стиральной машине.

Условия хранения и утилизация

Температура хранения от -15°C до 45°C. Храните грелку в расправленном состоянии, не сгибайте, не сминаяте. Не ставьте на грелку тяжелые вещи. Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с местными требованиями. Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

Гарантийные обязательства

Изготовитель обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание изделия* в течение 5 лет и гарантийные обязательства в течение 24 месяцев с даты приобретения прибора.

При обнаружении производственного дефекта в течение гарантийного срока неисправный прибор будет отремонтирован, а в случае невозможности ремонта заменен бесплатно. Гарантийные обязательства действительны только

* бесплатное сервисное обслуживание — устранение недостатков (дефектов) изделия возникших по вине производителя.

при полностью заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгового предприятия или печати технического обслуживания.

Гарантийное и бесплатное сервисное обслуживание не производится при наличии на приборе следов механического воздействия, следов вскрытия прибора, следов попыток ремонта вне авторизованного центра технического обслуживания, а также в других случаях нарушения потребителем правил хранения, транспортировки и технической эксплуатации прибора, предусмотренных правилами, изложенными в инструкции по эксплуатации. Гарантия не распространяется на комплектующие, расходные детали подверженные износу, а также на упаковку прибора. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие перенапряжения в электросети. Информацию по техническому обслуживанию, как в рамках настоящей гарантии, так и платному, можно получить в авторизованном сервисном центре или по телефону бесплатной горячей линии по России **8-800-200-33-22**.

Согласно «Закону Российской Федерации о защите прав потребителей» (ст.5 п.2) срок службы приборов V.Well установлен не менее 10 лет.

Учитывая высокое качество продукции V.Well, фактический срок службы приборов может значительно превышать официальный.

Политика компании V.Well предусматривает постоянное совершенствование продукции. В связи с этим компания оставляет за собой право вносить полные или частичные изменения в продукцию без предварительного уведомления и в соответствии с производственными требованиями.

Соответствие стандартам

EAC Высокое качество прибора подтверждено Сертификатом Соответствия Технического Регламента на территории Таможенного союза

Комплектность

- съемный чехол
- ручной регулятор температуры
- грелка
- инструкция пользователя
- гарантийный талон

Дата производства: первые четыре цифры серийного номера прибора.

Первая и вторая цифры — неделя производства, третья и четвертая — год производства.

Центральная сервисная служба

Москва, м. «Кантемировская», ул. Бехтерева, д. 27, тел. (495) 325-45-63

Режим работы: пн. - пт. 10.00 — 20.00; сб. в.с. — выходной

Адреса сервисных мастерских в Вашем городе Вы можете узнать по телефону бесплатной горячей линии **8 800 200-33-22** или на сайте компании «Альфа-Медика» www.alpha-medica.ru

Расшифровка символов, используемых на упаковке и этикетке:

	Обратитесь к инструкции по эксплуатации		-15°C — 35°C ПРИМЕНЕНИЕ	Ограничение по температуре применения
	Не выбрасывать вместе с бытовым мусором		-15°C — 45°C ХРАНЕНИЕ	Ограничение по температуре хранения
	Класс защиты от поражения электрическим током (II класс)		30°	Максимальная температура стирки 30°C; мягкий режим
	Изделие типа BF			Не отбеливать
	Производитель			Не применять сушку в барабане
	Модель			Глажение запрещено
	Серийный номер			Чистка запрещена
	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза			Не втыкайте булавки
	Сертификация CE			Не используйте в сложенном или смятом виде

Разработчик: V.Well Swiss AG, Gartenstrasse 9a, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland

Би.Велл Свисс АГ, Гартенштрассе 9а, CH-9435 Хеебрругг, Швейцария
www.bwell-swiss.ch

Производитель: Shijiazhuang Beijiren Electric Appliance Co., Ltd.
Sanhepu, Xinle, Shijiazhuang City, Hebei Province, China.

Шиджиажуанг Бейджирен Электрик Аплианс Ко., Лтд.
Санхепу, Хинле, Шиджиажуанг Сити, Хебей Провинс, Китай.

Сделано в Китае