

КАЛОПРИЕМНИК НЕОПОРОЖНЯЕМЫЙ

Предназначен для пациентов с колостомой или илеостомой диаметром от 30 до 60 мм
Рекомендуется для кратковременного применения (не более 6 часов),
при не полностью сформировавшейся стоме и необходимости частой замены

- изготовлены из запахо-непроницаемого полиэтилена
- размер емкости: длина 24,5 см, ширина 14 см
- неопорожняемый
- размер адгезивной пластины 10x10 см
- трафарет на клеевой пластине от 30 до 60 мм
- возможный диаметр отверстия от 30 до 60 мм
- прозрачный
- адгезивный слой нанесен на флизелиновую основу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- стерильный
- для одноразового использования
- перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Тщательно вымыть кожу вокруг стомы теплой водой с нейтральным мылом, очистить от волос и остатков клеевого слоя
2. По нанесенному на бумажное покрытие шаблону со стандартными отверстиями подобрать размер отверстия, соответствующий диаметру стомы (можно воспользоваться зеркалом)
3. Если стома имеет неправильную форму - изменить форму отверстия в трафарете с помощью ножниц (желательно использовать ножницы с закругленными тупыми концами)
4. Размер вырезанного отверстия должен на 3-4 мм превышать размер стомы

5. Вырежьте отверстие в клеевом слое по нанесенному контуру, следя, чтобы не прорезать калоприёмник насквозь
6. У лежащих пациентов нижний конец калоприемника должен быть направлен не к ногам, а к спине
7. Снять защитное бумажное покрытие с нанесенной разметкой
8. Совместите нижний край вырезанного отверстия с нижней границей стомы (можно использовать зеркало)
9. Приклеить калоприемник к коже, начиная с нижнего края пластины, следя, чтобы на клеевом участке не образовались складки (негерметичность калоприемника)!
10. Прижать рукой край отверстия к коже, прилегающей к стоме, на 1 мин
11. Снимают калоприемник в обратном порядке, начиная с верхнего края


ВНИМАНИЕ! Не допускать попадания воды в верхнюю часть пакета во избежание ее проникновения под клеевой слой - это ведет к преждевременному отклеиванию калоприемника.

Калоприемник наклеивается на кожу только 1 раз, повторное его использование не допускается.

Если под клеевым слоем возникло ощущение жжения, надо немедленно снять калоприемник, так как, возможно, возникла аллергическая реакция.

Регулярно производите смену калоприемника! Производить замену калоприемника при заполнении на 1/3-1/2 объема. Несоблюдение этого правила может привести к попаданию содержимого под клеевой слой и отклеиванию калоприемника.

Для предупреждения травмирования кожи не снимать калоприемник рывком, с использованием механических средств или химических растворителей.

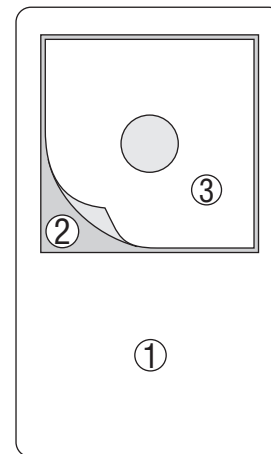

1. Мешок-емкость; 2. Адгезивный слой; 3. Трафарет

REF.	Каталожный номер
MFD	Дата производства
EXP	Использовать до
LOT	Номер партии
STERILE EO	Стерилизовано оксидом этилена
NON TOXIC	Не токсично
PYROGEN FREE	Апирогенно
	Для одноразового использования
	Смотрите инструкцию

РУ № ФСЗ 2009/05780 от 18.12.2009

Производитель: Цзянсу Кайшоу Медикал Аппаратус Ко., Лтд.
Адрес: Саньхэкоу, Цзяоси Учзынь, Чанчжоу, Цзянсу, КНР
По заказу «Апексмед Интернэшл Б.В.»
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды