

КАЛОПРИЕМНИК

2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ • ОТКРЫТЫЙ • С ФИЛЬТРОМ

Предназначен для пациентов с колостомой или илеостомой диаметром от 15 до 57 мм. Рекомендуется применять при сформированной стоме

- мешок изготовлен из запахопроницаемого поливинилхлорида
- размер мешка 25 x 14 см
- диаметр отверстия адгезивной пластины от 15 до 57 мм
- трафарет на клеевой пластине
- размер фланцевого соединения до 70 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- стерильный
- перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. тщательно вымыть кожу вокруг стомы теплой водой с нейтральным мылом, очистить от волос и остатков клеевого слоя
2. по нанесенному на бумажное покрытие шаблону (3) со стандартными отверстиями подобрать размер отверстия, соответствующий диаметру стомы (можно воспользоваться зеркалом)
3. если стома имеет неправильную форму - изменить форму отверстия в трафарете с помощью ножниц (желательно использовать ножницы с закругленными тупыми концами)
4. размер вырезанного отверстия должен на 3-4 мм превышать размер стомы
5. вырежьте отверстие в клеевом слое по нанесенному контуру, следя, чтобы не прорезать калоприемник насквозь

6. у лежащих пациентов нижний конец калоприемника должен быть направлен не к ногам, а к спине
7. снять защитное бумажное покрытие с нанесенной разметкой
8. совместите нижний край вырезанного отверстия с нижней границей стомы (можно использовать зеркало)
9. приклеить адгезивную пластину (2) к коже начиная с нижнего края пластины, следя, чтобы на клейком участке не образовались складки
10. прижать рукой край отверстия к коже, прилежащей к стоме, на 1 мин
11. возьмите колостомный мешок (1) и насадите на кольцо пластины (2)
12. по мере наполнения калоприемника опорожняйте его

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускайте попадания воды в верхнюю часть пакета во избежание ее проникновения под клеевую слой – это ведёт к преждевременному отклеиванию адгезивной пластины.
- Если под адгезивной пластиной возникло ощущение жжения, её надо немедленно снять. Это может быть аллергическая реакция.
- Регулярно опорожняйте калоприёмник ! Обычно калоприёмник опорожняется при заполнении на 1/3-1/2 объёма. Несоблюдение этого правила может привести к попаданию содержимого под клеевой слой и отклеиванию калоприемника.
- Для предупреждения травмирования кожи не снимайте адгезивную пластину рывком, с использованием механических средств или химических растворителей.

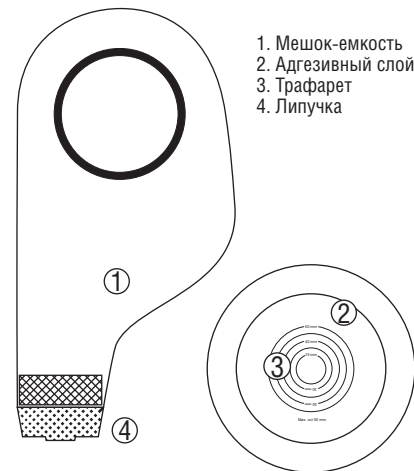

1. Мешок-емкость
2. Адгезивный слой
3. Трафарет
4. Липучка

REF.	Каталожный номер
MFD	Дата производства
EXP	Использовать до
LOT	Номер партии
STERILE EO	Стерилизовано оксидом этилена
NON TOXIC	Не токсично
PYROGEN FREE	Апирогенно
	Для одноразового использования
	Смотрите инструкцию

РУ № ФСЗ 2009/05780 от 18.12.2009

Производитель: Цзянсу Кайшоу
Медикал Аппаратус Ко., Лтд.
Адрес: Саньхэкоу, Цзянси Уцзынь,
Чанчжоу, Цзянси, КНР
По заказу «Апексмед Интернэшнл Б.В.»
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,
Амстердам, Нидерланды