

РЕКТАЛЬНЫЙ ЗОНД

Предназначен для введения лекарственных средств и дренажа прямой кишки

- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
- атравматичный дистальный конец
- закрытый конец, 2 боковых отверстия
- длина зонда 38 ± 2 см
- стерилизация оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до $+45^{\circ}\text{C}$
- утилизация и обработка в установленном порядке

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- надеть перчатки
- трубку смазать вазелином, взять в правую руку
- ввести трубку в прямую кишку на глубину 15–20 см
- наружный конец трубки должен выступать из заднего прохода не менее, чем на 10 см

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ЛЕЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ

- для введения лекарственных средств или орошения кишки необходимо подсоединить к канюле зонда шприц или резиновый баллон
- ввести лекарственное средство, продуть воздухом зонд для полного его освобождения от лекарства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ДРЕНАЖА ПРЯМОЙ КИШКИ

- опустить наружный конец трубки в судно с водой
- оставить трубку на 1-2 часа до полного отхождения газов
- по окончании манипуляции ректальный зонд извлечь через салфетку, смоченную в дезрастворе
- область заднего прохода протереть салфеткой, в случае раздражения смазать мазью
- обработка и утилизация в установленном порядке

ВНИМАНИЕ!

Резиновый баллон после введения лекарственного средства отсоединить от канюли зонда не разжимая!

Размер CH/FR	Внутренний диаметр I.D (мм)	Внешний диаметр O.D (мм)	Цвет
28	7,5	9,3	желтый
30	8,0	10	черный
32	8,7	10,7	синий
34	9,3	11,3	зеленый
36	10,0	12,0	голубой

REF Каталогный номер

MFD Дата производства

EXP Использовать до

LOT Номер партии

**NON TOXIC
PYROGEN FREE
PHTHALATE FREE**

STERILE EO

Не токсично

Апирогенно

Без фталатов

Стерилизовано
оксидом этилена



Смотрите инструкцию



Для одноразового
использования

Рег. уд. № ФСЗ 2008/02867 от 19.11.2008

“Алексмед Интернэшнл Б.В.” Кейзерсграхт,
62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды



ИМ15