



VIBERECT®


X3

Viberect® Вибромассажный аппарат для
стимуляции пениса

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Внимание: Перед первым использованием Viberect® необходимо заряжать аккумулятор в течение 8 часов. Не оставляйте разряженный аккумулятор на длительное время без подзарядки.

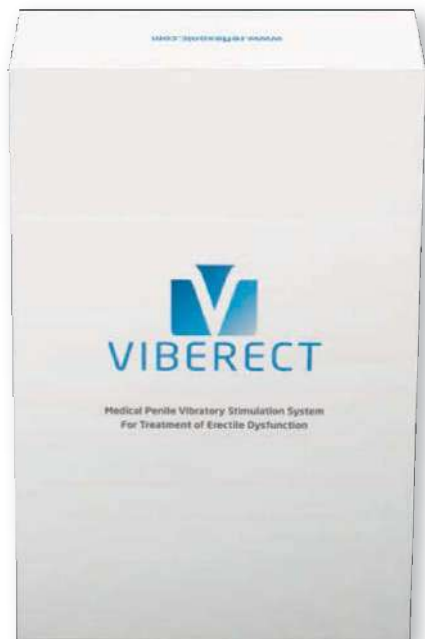

Произведено для:

Reflexonic®
Innovative Urological Solutions

Reflexonic, LLC
Толл Хаус Эвенью, 915, комната 209
г. Фредерик, MD 21701
Телефон: +1301.378.8433
Факс: + 1800.886.1470
Email: customerservice@reflexonic.com
www.Reflexonic.com



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Вибромассажный аппарат для стимуляции полового члена **Viberect®X3** является ручным прибором, который используется для стимуляции эякуляции у мужчин с травмой спинного мозга.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Гарантия.....	2
Батарея.....	3
Меры предосторожности для безопасного использования.....	4
Инструкция по эксплуатации Viberect®	5-6
Способ применения – достижение эякуляции	7-8
Советы по эякуляции для мужчин с травмой спинного мозга..	9
Инструкции по чистке	10
Снятие и замена подушечек.....	10
Отчет по электромагнитному излучению	11
Технические характеристики Viberect®	12
Таблица символов	13
Служба поддержки клиентов и контактная информация.....	13
Пошаговые инструкции.....	14



Смотрите нас на YouTube
“**Viberect**”



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ПРИ ТРАВМАХ СПИННОГО МОЗГА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РИСК АВТОНОМНОЙ ДИСРЕФЛЕКСИИ.



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ВВЕДЕНИЕ

Вибромассажный аппарат для стимуляции полового члена **Viberect®X3** является ручным вибратором, произведенным в США, который используется для стимуляции эякуляции у мужчин с травмой спинного мозга.

Вибромассажная стимуляция полового члена является простым и неинвазивным методом стимуляции нервов, аналогичным стимуляции при половом акте или ручной стимуляции, которая помогает активировать нервные рецепторы (нервные окончания), расположенные на поверхности кожи пениса. Эти рецепторы связываются с сексуальными центрами в мозге и спинном мозге. Активация и возбуждение половых рефлексов посредством аппарата **Viberect®** помогает стимулировать твердую эрекцию. Этот прибор разработан урологами, специализирующимися на нарушениях половой функции, чтобы помочь мужчинам пользоваться данным методом дома в комфортных условиях.

В данном руководстве по эксплуатации представлена информация и инструкции, которым необходимо следовать с целью обеспечения безопасной работы прибора **Viberect®**. Это руководство также содержит меры предосторожности, которые необходимо всегда соблюдать.



ВНИМАНИЕ:
НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ГАРАНТИЯ

Производитель дает гарантию отсутствия электрических и механических нарушений у прибора **Viberect®**, обусловленных дефектными деталями и/или некачественной сборкой, в течение 12 месяцев от даты приобретения.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в ходе серьезных повреждений, вскрытия или изменения продукта каким-либо образом или в связи с нарушением правил обращения с прибором, его очистки или использованием не по назначению, а так же несоблюдением инструкций руководства по эксплуатации. Ответственность производителя ограничивается заменой некачественной продукции.

Компания Reflexonic не несет ответственности за любой случайный или вторичный ущерб вне зависимости от того, является ли он прямым или косвенным.

БАТАРЕЯ

Перед доставкой батарею в Вашем приборе **Viberec®** не заряжают.

Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется примерно 6-8 часов. После завершения цикла красный индикатор зарядки погаснет.

Чтобы Ваш прибор **Viberec®** был всегда готов к использованию, рекомендуется заряжать батарею после использования. Не оставляйте устройство в режиме зарядки более, чем на 8 часов.

Полностью заряженная батарея обеспечивает примерно 30 минут вибраций на средней частоте.

Если батарея полностью разряжена, заряжайте ее в течение 6-8 часов. Перед зарядкой удостоверьтесь, что вибратор отключен.

Используйте только зарядное устройство, которое входит в комплект с вибратором. Во время зарядки положите прибор **Viberec®** набок таким образом, чтобы два наконечника не соприкасались под действием собственного веса, и прибор не включился самостоятельно.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во время зарядки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Модификация оборудования запрещена. Если оборудование модифицировано, необходимо провести соответствующий осмотр и испытания с целью обеспечения последующей безопасной эксплуатации оборудования.

Утилизация батарей

Аккумуляторная батарея в вибраторе является никель-металлгидридной (NiMH).

Как и другие батареи данного типа при нагревании или прокалывании она выделяет токсичные вещества, которые могут нанести вред здоровью.

У прибора нет заменяемого внутреннего источника питания. Конечный потребитель не может менять батарею. Если Вы хотите утилизировать прибор, не разбирайте его на комплектующие части. Утилизуйте прибор полностью.

Более подробную информацию о способах вторичной переработки и надлежащей утилизации твердых отходов можно получить у местных органов, занимающихся твердыми отходами.

Срок службы батареи в значительной степени зависит от осторожного обращения. При правильном обращении батарея способна работать в течение более 500 циклов заряд-разряд до потери 20% емкости. Во время зарядки, работы или хранения прибора температура окружающей среды не должна увеличиваться.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Каждый прибор Viberect® предназначен для индивидуального использования. Им нельзя пользоваться совместно с другими лицами, так как это увеличит риск инфекционных заболеваний или заболеваний, передающихся половым путём. Обращайтесь с Вашим прибором как с зубной щеткой или гигиеническими продуктами для индивидуального пользования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя использовать прибор на отеках, воспаленных участках или при кожных высыпаниях. Запрещается использовать прибор при возникновении боли неустановленной этиологии в икрах. Обратитесь к врачу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждений кожи не используйте прибор более 10 минут в день. Чрезмерная вибромассажная стимуляция может увеличить риск возникновения раздражения кожи и временного онемения.

Вибромассажная стимуляция может привести к поверхностной травме кожи, вследствие которой может возникнуть кровоподтёк, кровотечение или поверхностное изъязвление. При появлении одного из данных состояний воздержитесь от использования прибора и обратитесь к врачу. Не опускайте вибратор в какую-либо жидкость. Не пользуйтесь вибратором в ванной комнате или во влажных помещениях. В результате вибромассажной стимуляции у пользователя с травмами спинного мозга может возникнуть приступ автономной дисрефлексии. В случае возникновения такого приступа работу с прибором необходимо немедленно прекратить и обратиться к врачу.

Автономная дисрефлексия (увеличение кровяного давления, потоотделение, головные боли) может быть обусловлена различными факторами, например, сильно вздутый кишечник или растянутый мочевого пузырь. Процедуры, которые предполагают стимуляцию оргазма или вибромассажную стимуляцию, могут спровоцировать острый приступ автономной дисрефлексии.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если после использования прибора Viberect® у пользователя наступает эрекция, которая длится более четырех часов, немедленно обратитесь к врачу или в отделение интенсивной терапии, так как может развиваться **приапизм**, что является состоянием, представляющим опасность для жизни. Приапизм – это нарушение, при котором происходит застой эритроцитов с низким содержанием кислорода в пенисе. Данное состояние требует срочной медицинской или хирургической помощи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте прибор Viberect® при окружающей температуре выше 35°C.

VIBERECT® X3

Вибромассажный аппарат для
стимуляции пениса

Инструкция по эксплуатации



Аксессуары и съемные части

1. Мягкие подушечки (входят в набор) являются съемными и заменяемыми.
- При заказе на замену мягких подушечек, предоставляется пара.
2. Зарядное устройство аккумулятора.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ



КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ НА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Прибор можно включать и выключать, нажимая кнопку на сенсорной панели. Чтобы выключить прибор, удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 3 секунд.



НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ

По желанию можно регулировать частоту с 70 Гц до максимальных 110 Гц путем нажатия на кнопки + или -.

Светодиодные индикаторы показывают увеличение с шагом по 5 Гц, что видно по красным светодиодным индикаторам, которые последовательно включаются справа налево.



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА

Одиночный красный светодиодный индикатор показывает, что прибор необходимо зарядить. Если красный индикатор не горит, у прибора достаточно мощности для применения.

КНОПКА И ИНДИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШЕЧКАМИ



У прибора есть 3 режима работы:

1. Вибромассажная стимуляция верхней поверхности пениса (дорсальная),
2. Вибромассажная стимуляция нижней поверхности пениса (вентральная) или
3. Обоих поверхностей (рекомендуется для достижения максимальной сексуальной реакции). Эти режимы

удобно переключаются во время работы прибора нажатием кнопки управления подушечками один, два или три раза до переключения на желаемый режим. Светодиодные индикаторы показывают режимы.



ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ

Гнездо зарядки расположено на задней части прибора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ЭЯКУЛЯЦИИ *Мужчинам с травмами спинного мозга*



ВНИМАНИЕ:

Если ваша травма расположена выше уровня позвоночника Т6, вы должны строго соблюдать рекомендации врача, чтобы не допустить автономной дисрефлексии.

Ощущения при автономной дисрефлексии включают внезапную давящую головную боль и быстрое увеличение кровяного давления в связи с чрезмерной активацией автономной нервной системы. Если ваша травма расположена выше уровня позвоночника Т6, возможно, что ваш организм утратил способность автономно контролировать кровяное давление.

Мы рекомендуем провести, по крайней мере, две процедуры вибрационной стимуляции в клинических условиях перед тем, как использовать прибор Viberect® дома.

Рекомендуются следующие исходные настройки:

Частота: 100 Гц

Амплитуда: 3 мм (постоянная)

Примите удобное положение перед включением прибора Viberect®.

Расположитесь лежа на твердом матрасе, массажном столе или даже на полу.

Продолжайте вибрацию до тех пор, пока не начнется эякуляция или на протяжении не более 3х минут с паузой в 1 минуту.

Рефлекторная дуга может истощиться, если вы будете проводить стимуляцию на высокой амплитуде более 1-2 раз каждые 7-10 дней или на протяжении более 3-5 минут без пауз между попытками.



Уровень эффективности может существенно повыситься, если стимуляция полового члена будет проведена профессионалом в клинике по лечению бесплодия для лиц с травмами спинного мозга или подготовленной супругой.

Используйте прибор на максимальной настройке в течение двух минут, после чего сделайте паузу в течение двух минут, а затем – проведите еще 2 минуты стимуляции.

Будьте готовы отобрать образец в стерильную чашку.



Viberect®

Создать семью теперь просто...

СОВЕТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЭЯКУЛЯЦИИ У МУЖЧИН С ТРАВМАМИ СПИННОГО МОЗГА

Написано Дэвидом Баком, чемпионом по теннису, имеющим травму спинного мозга

Я использую ВСП (вибромассажную стимуляцию пениса) для стимуляции эякуляции на протяжении более чем 16 лет. При использовании ВСП пациентом с травмой спинного мозга, поражением головного мозга, инсультом или рассеянным склерозом, пациент должен понимать, как он будет реагировать на вибрационную стимуляцию. Мы можем достичь успешной эякуляции, используя Viberect® X3 один или два раза в неделю.

Рефлекторная дуга может истощиться, если мы будем проводить стимуляцию вибрацией с высокой амплитудой более 1-2 раз каждые 7-10 дней или в течение более чем 3-5 минут без пауз между попытками.

При использовании ВСП с целью оплодотворения или отбора спермы для будущего оплодотворения я всегда рекомендую не применять вибрационную стимуляцию в течение 10 дней для получения положительного результата в день, когда у вашей супруги овуляция или, когда доктора отбирают вашу сперму.

Перед использованием ВСП вы должны находиться в расслабленном состоянии. И в таком положении тела, которое обеспечивает тонус мышц нижних конечностей. Если вы не ходите и ежедневно используете кресло-каталку, то лучшее положение – это лежать на спине так, чтобы мышцы-сгибатели бедра растянулись в горизонтальном положении. Если стимулировать мышцы-сгибатели бедра массажными движениями при использовании ВСП, это также может привести к тонусу мышц и вызвать лучшую реакцию на ВСП. Ваша жена может согнуть пяточное сухожилие (Ахиллесово сухожилие), проводя ВСП, что также повысит тонус мышц.

Если вы принимаете лекарственные препараты для снижения спастичности, это может напрямую негативно сказаться на успешности достижения эякуляции. Поэтому то время, когда ваше тело в наименьшей степени подвержено действию таких лекарственных препаратов, - это лучшее время для ВСП.

В некоторых случаях количество лекарственного препарата может быть слишком большим, чтобы достичь результата в любое время.

Вам следует сначала проконсультироваться с врачом, и, если он одобрит уменьшение дозы или пропуск приема дозы вашего лекарственного препарата, это может помочь достижению успешной эякуляции.

В клинических исследованиях спастичность мышц уменьшалась или устранялась на время от 2х до 24х часов после каждого применения. Именно поэтому нам необходим полноценный отдых перед каждой попыткой эякуляции с ВСП.

Если ваши попытки безуспешны, возможно, что поверхность, на которой вы

лежите, слишком мягкая. Попробуйте лечь на твердый матрас, массажный стол или даже на пол. Вы можете положить что-то вроде плотного поролонового коврика или что-либо подобное под большую ягодичную мышцу (задняя часть), чтобы растянуть мышцы-сгибатели бедра на более чем 180 градусов, чтобы сделать тело более спастичным.

ВСП будет работать на половом члене в полностью расслабленном состоянии (мягком половом члене) и может в некоторых случаях работать более эффективно с расслабленным членом, чем с членом в эрегированном состоянии. После успешной эякуляции внутри уретрального канала остается около 1 чайной ложки эякулята. Поэтому при последующем обычном половом акте возможно зачать ребенка. Либо с помощью вагинального или орального секса можно вызвать продолжение эякуляции.

ЧИСТКА

Для того чтобы быть уверенным, что Ваш прибор **Viberect®** всегда готов к использованию, рекомендуется чистить обе вибрирующие подушки и всю поверхность прибора, а также заряжать батарею после каждого использования.

Протрите внешнюю часть вибратора сухой или смоченной в спирте тканью. Не опускайте **Viberect®** в жидкость.

После каждого применения необходимо вытирать лосьон или влагу с подушек и корпуса прибора с помощью сухой и чистой ткани, а также протирать их спиртосодержащими салфетками.

Извлечение и замена мягких подушечек прибора **Viberect®**


Если у мягких подушечек прибора **Viberect®** появились признаки износа и/или разрушения, их необходимо немедленно заменить. В частности, проверьте поверхность подушечки на наличие признаков износа/разрушения и, при необходимости, замените ее, проверьте целостность сборки «подушечка – крепление подушечки». Просто потяните каждую подушечку по направлению от корпуса прибора (см. изображение). Установите новые подушечки, с легкостью защелкнув их в креплении для подушечек. При замене подушечек удостоверьтесь, что прибор находится в выключенном состоянии. Утилизируйте использованные подушечки в закрытом контейнере для мусора.



Потяните в этом направлении, чтобы снять мягкие подушечки

Мягкие подушечки для **Viberect®**

Мягкие подушечки можно купить на www.viberect-russia.ru

Руководство и декларация производителя - электромагнитное излучение			
Прибор Viberec предназначен для использования в электромагнитной окружающей среде, определенной ниже. Клиент или пользователь прибора Viberec должен убедиться в том, что прибор используется именно в такой среде.			
Проверка отработанных газов На токсичность	Соответствие	Электромагнитное излучение - руководство	
Радиоизлучение СИСПР11 (Международный специальный комитет по радиопомехам)	Группа1	Прибор Viberec использует радиочастотную энергию только для своей внутренней функции. Поэтому его радиоизлучение очень низкое и маловероятно, что оно будет препятствовать работе радиозлектронного оборудования, находящегося поблизости.	
Радиоизлучение СИСПР11	Класс В	Прибор Viberec подходит для использования во всех учреждениях, включая домашние условия и условия, напрямую связанные с сетями общественных источников питания низкого напряжения, которые располагаются в зданиях, предназначенных для бытовых целей.	
Эмиссия гармонических Составляющих МЭК 61000-3-2 (международная электротехническая комиссия)	Класс В		
Колебания напряжения/фликер-шум	Соответствует		
Руководство и декларация производителя – защита от электромагнитных полей			
Прибор Viberec предназначен для использования в электромагнитной окружающей среде определенной ниже. Клиент или Пользователь прибора Viberec должен убедиться в том, что прибор используется именно в такой среде.			
Испытания на помехоустойчивость	Уровень испытания МЭК60601	Уровень соответствия	Электромагнитное излучение - руководство
электростатический разряд (ЭСР) МЭК61000-4-2	±6к Вконтактный ±8к Ввоздушный	Соответствует	Пол должен быть деревянным, Цементным или из керамической плитки. Если пол покрыт синтетическим материалом, то относительная влажность должна быть, по меньшей мере, 30%
Излучаемые Радиоволны МЭК61000-4-3	3В/м 80МГц до2,5ГГц	Соответствует	Как установлено с помощью Электромагнитного обследования объекта, напряженность поля за пределами экранированного места расположения от стационарных передатчиков радиосигналов должна быть не менее 3В/м. Помехи могут появиться при расположении вблизи оборудования, обозначенного следующим символом: 
Наведенные радиоволны ЭК61000-4-6	3В rms150кГ ц до 80 МГц	Соответствует	
Кратковременная Неустойчивость в электропитании МЭК61000-4-4	±2кВсетьпитания ±1кВ/Осети	Соответствует	Качество основного электропитания Должно быть стандартным, как для промышленных или больничных условий.
Скачокнапряженияв сети МЭК610004-5	±1 кВдифференциальный ±2кВобщий	Соответствует	
Магнитное поле промышленной частоты МЭК61000-4-8	3 А/м	Соответствует	Магнитное поле промышленной частоты должны быть на уровнях, характерных для стандартного места расположения в стандартных промышленных или больничных условиях.
Падение напряжения, кратковременное прерывание энергоснабжения и перепады напряжения на входной линии электропитания МЭК610004-11	>95% падение для 0,5 цикла 60% падение для 5 циклов 70% падение для 25 циклов 95% падение 5 секунд	Соответствует	Качество основного электропитания должно быть стандартным, как для промышленных или больничных условий. Если пользователю требуется непрерывное функционирование прибора Viberec, рекомендуется питать прибор от источников бесперебойного питания или от батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VIBERECT®X3 ВИБРОМАССАЖНОГО АППАРАТА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ПЕНИСА

Источник питания.....SLPower(AULT)MENB1010A0903F01
Диапазон частот (с полностью заряженной батареей).....70 – 110 Гц
Амплитуда (от пика к пику).....3,0 мм
Батарея.....Ni-MH, перезаряжаемая 4 AA
Температура.....Избегайте использования **Viberect®** при температуре выше 35°C
Хранение.....температура окружающей среды 20-25°C

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ



Код партии



Номер по каталогу



Следуйте инструкции по применению



Применяемая часть типа В.
“Прибор обеспечивает защиту от электрического удара”



Не утилизировать с другими отходами



Осторожно!



Не использовать, если повреждена упаковка



Производитель и дата производства



Хрупкое

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Служба поддержки клиентов:

<http://feedback.extender24.ru/> (рекомендуемый способ)

с 9.00 до 18.00

Представители Viberect® в России:

ООО «Аларго»

г. Санкт-Петербург, 197342,

ул. Сердобольская д.64, лит.А, корп.1, 5 эт., оф. 514

Данное руководство пользователя также доступно на:

английском, испанском, немецком, французском, португальском, итальянском, голландском, китайском, польском

WWW.VIBERECT-RUSSIA.RU

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Reflexonic® Pre-Viberect®

Комплекс упражнений и правильное применение прибора Viberect® для достижения оптимальной сексуальной реакции



1. Лягте на спину или примите удобное положение сидя. Сожмите головку полового члена, как показано на изображении.



2. Сдавите головку и растягивайте пенис до естественного предела. Вы должны почувствовать легкое потягивание в паховой области и половом члене.



3. Ослабьте натяжение, чтобы пенис вернулся в исходное положение.

Не отпускайте головку.



4. Повторяйте шаги 2 и 3 каждые 2-3 секунды на протяжении 2-3 минут.

Пенис будет постепенно наполняться артериальной кровью и становится твердым, открывая нервные окончания для стимуляции прибором Viberect®.



5. Поднесите мягкие подушечки к головке пениса, удерживая прибор Viberect® ближе к вибрирующим концам.

Попробуйте различные позиции. Очень эффективным является положение стоя, половой член находится ниже уровня сердца.



6. Viberect® автоматически включится, как только Вы начнете его сжимать. Вы можете менять положение Viberect®, чтобы найти более чувствительную область.



7. Теперь растяните пенис, не прекращая стимулировать его прибором Viberect® и удерживайте в течение нескольких минут (2-5 минут).



8. Во время стимуляции думайте о сексе и возбуждающем прошлом опыте или о недавних половых актах.

Благодаря петле обратной связи между пенисом и мозгом стимулируются сексуальные центры в спинном мозге. Расслабьтесь. Избегайте раздражения и беспокойства.



Предупреждение: используя данные инструкции, Вы принимаете на себя все риски. Не выполняйте стимуляцию pre-Viberect® и Viberect®, если на пенисе есть поражения или повреждения. Использование прибора Viberect® у мужчин с повреждениями спинного мозга может способствовать появлению автономной дисрефлексии.