

ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ

Предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью.

Может быть использован для энтерального питания

- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
- атравматичный терминальный конец
- общая длина зонда 76 ± 2 и 110 ± 2 см, открытый конец, 4 боковых отверстия
- метки от дистального конца расположены на расстоянии:
 - первая - 46 см (вход в желудок - кардиальная часть)
 - вторая - 56 см (тело желудка),
 - третья - 66 см (привратник)
- стерилизован оксидом этилена



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до $+45^{\circ}\text{C}$
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- измерить расстояние от резцов до пупка плюс ширина ладони больного. 1 метка - «вход в желудок»
- поместить зонд на корень языка и продвигать его до 1-й метки вслед глотательным движениям
- убедиться, что зонд в желудке (аускультация эпигастральной области при введении в желудок через зонд 20 мл воздуха)
- продвинуть зонд ещё на 7-10 см в желудок (2-я метка)
- по окончании манипуляции извлечь зонд через салфетку смоченную дезраствором
- обработать и утилизировать зонд в установленном порядке
- закрепить свободный конец зонда на щеке пациента с помощью лейкопластыря или специального набора

| CH/FR | I.D. (MM) | O.D. (MM) | ЦВЕТ | ДЛИНА, MM | |
|-------|-----------|-----------|---------------|-----------|------|
| 6 | 1,1 | 2,0 | бордовый | 760 | 1100 |
| 8 | 1,7 | 2,7 | голубой | 760 | 1100 |
| 10 | 2,3 | 3,3 | черный | 760 | 1100 |
| 12 | 2,8 | 4,0 | белый | 760 | 1100 |
| 14 | 3,3 | 4,7 | зеленый | 760 | 1100 |
| 16 | 3,8 | 5,3 | оранжевый | 760 | 1100 |
| 18 | 4,5 | 6,0 | красный | 760 | 1100 |
| 20 | 5,1 | 6,7 | желтый | 760 | 1100 |
| 22 | 5,6 | 7,3 | синий | 760 | 1100 |
| 24 | 6,2 | 8,0 | фиолетовый | 760 | 1100 |
| 26 | 6,9 | 8,7 | зеленый | • | 1100 |
| 28 | 7,5 | 9,3 | темно-зеленый | • | 1100 |
| 30 | 8,0 | 10,0 | серый | • | 1100 |
| 32 | 8,7 | 10,7 | коричневый | • | 1100 |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| REF. | Каталожный номер | STERILE EO | Стерилизовано оксидом этилена |
| MFD | Дата производства | NON TOXIC | Не токсично |
| EXP | Использовать до | PYROGEN FREE | Апирогенно |
| LOT | Номер партии | PHTHALATE FREE | Без фталатов |
|  | Для одноразового использования |  | Смотрите инструкцию |

Рег. уд. № ФСЗ 2008/02867 от 19.11.2008

Производитель: "Алексмед Интернэшнл Б.В."
Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS, Амстердам, Нидерланды

