

B.Well

С заботой о каждом

Инструкция по эксплуатации



WN-114

Ингалятор медицинский

RU

KZ



PRO

MED

TECHNO

ИНГАЛЯТОР МЕДИЦИНСКИЙ В.WELL

Модель WN-114

Содержание

1. Введение.....	4
2. Инструкция по технике безопасности	4
Опасность поражения электрическим током.....	7
3. Противопоказания	7
4. Изображение прибора и его основные части	8
5. Подготовка прибора к работе.....	9
Ингаляции через мундштук	10
Ингаляции через маску	11
6. Очистка, уход и хранение	12
Очистка перед первым использованием – дезинфекция	12
Очистка после каждого использования	12
7. Таблица возможных неисправностей.....	14
8. Технические характеристики.....	14
Комплектация.....	15
9. Сертификаты	16
10. Гарантийные обязательства	16

Ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, поздравляем Вас с приобретением медицинского ингалятора (небулайзера)* WN - 114 компании B.Well.

Данный прибор предназначен для проведения ингаляционной терапии, направленной на профилактику и лечение острых респираторных заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей, например, хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), муковисцидоза, бронхиальной астмы, пневмонии и других заболеваний органов дыхания как взрослых пациентов, так и детей, либо в лечебных учреждениях, либо на дому.

Принцип действия прибора основан на инновационной технологии распыления лекарства с использованием сетки-мембранны. В данном приборе для аэрозольной терапии распыление лекарственного средства происходит при прохождении потока препарата через мельчайшие отверстия в сетке-мембране.

Технология характеризуется **низким уровнем шума**. Особая конструкция аэрозольной камеры позволяет проводить ингаляции под углом наклона до 45° без ущерба для процесса распыления, что делает его удобным для проведения ингаляций лежачим больным и маленьким детям во время сна. Компания B.Well гарантирует, что данный прибор произведен из высококачественных материалов и соответствует действующим национальным и международным стандартам безопасности. Небулайзер является медицинским прибором, поэтому использовать его можно только в соответствии с указаниями Вашего врача.

Пожалуйста, перед использованием прибора внимательно изучите инструкцию и следуйте данным рекомендациям!

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования внимательно изучите инструкцию. Сохраняйте ее в течение всего срока службы прибора. Данный прибор предназначен только для ингаляционной терапии. Любое иное применение считается неправильным, а следовательно, опасным. Производитель

* далее по тексту слова «ингалятор» и «небулайзер» считать равнозначными.

не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного применения прибора.

Правила использования небулайзера

В мембранным небулайзере B.Well WN - 114 может применяться весь перечень лекарственных препаратов, рекомендованных для небулайзерной терапии.

Тип лекарственного средства, дозу и режим введения может назначить только лечащий врач.

⚠ Внимание! В качестве препаратов для небулайзерной терапии категорически запрещено применять:

- вещества и растворы, содержащие взвешенные частицы (отвары, суспензии, настои и т.д.). Взвешенные частицы значительно крупнее, чем частицы респирабельной фракции. Использование их в небулайзере может нанести вред здоровью;
- маслосодержащие растворы (в том числе эфирные масла). Частицы масел, попадая в нижние дыхательные пути, образуют мельчайшие пленки и повышают риск развития так называемых «масляных пневмоний»;
- огнеопасные анестезирующие смеси, легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом, кислородом и закисью азота;
- ароматические вещества.

⚠ Внимание!

- Внимательно следите за сроком годности разрешенных к использованию растворов. Не используйте растворы с истекшим сроком годности.
- Во избежание распространения инфекций, не допускается использование одних и тех же комплектующих различными пациентами без предварительной дезинфекции.
- Если вы используете комплектующие первый раз или после длительного хранения, их очистку и дезинфекцию необходимо провести до начала использования прибора.
- Очистку и дезинфекцию комплектующих необходимо проводить каждый раз после использования прибора. Удостоверьтесь, что детали

должным образом продезинфицированы и высушенны, после чего храните их в чистом месте.

- Всегда очищайте небулайзер и его составные части от остатков лекарственных и моющих веществ. Никогда не оставляйте очищающий раствор в камере, мундштуке или на маске.
 - Небулайзер и его компоненты нельзя сушить в микроволновой печи, феном или с помощью других бытовых приборов.
 - При использовании не накрывайте небулайзер одеялом, полотенцем и т.д.
 - Храните прибор в недоступном для детей месте. Прибор содержит мелкие детали, опасные для ребенка. Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых.
 - Не подвергайте прибор воздействию вредных паров или летучих веществ.
 - Не наливайте в емкость для лекарств более 8 мл лекарственного раствора.
 - Не роняйте прибор и не подвергайте его повреждениям.
 - Прибор одобрен только для использования человеком. Используйте его только по назначению.
 - Не использовать прибор для распыления лекарственных препаратов в форме порошка или препаратов с кислой средой. Не использовать для распыления воды. В качестве жидкости использовать только физиологический раствор (изотонический раствор хлорида натрия).
 - После каждого использования необходимо производить чистку прибора, так как остатки использованного препарата могут затвердеть и повредить механизм и сетку-мембрану.
 - Перед использованием прибора необходимо убедиться в отсутствии неисправностей и видимых физических повреждений. При наличии каких-либо сомнений не следует использовать прибор, необходимо связаться с авторизованным сервисно-консультационным центром или позвонить по бесплатной горячей линии в России 8-800-200-33-22.
 - В случае неисправности и/или ненормальной работы прибор необходимо немедленно выключить, не пытаясь его ремонтировать самостоятельно.
- В любых случаях по вопросам ремонта следует обращаться в авторизованный сервисно-консультационный центр.

Опасность поражения электрическим током

- Прибор не защищен от проникновения жидкости.
- Нельзя прикасаться к прибору мокрыми руками.
- Не отсоединяйте распылитель при работающем приборе.
- Не погружайте прибор в воду.
- Нельзя оставлять включенный прибор без присмотра.
- Ремонт данного прибора должен осуществляться только в центрах технического обслуживания, рекомендованных компанией B.Well.



⚠ Внимание! Данный прибор оснащен датчиком, автоматически отключающим прибор при отсутствии лекарственного средства в аэрозольной камере.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Прибор необходимо использовать согласно данной инструкции и строго по предписаниям Вашего лечащего врача.



4. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИБОРА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

- Ru
1. Корпус прибора
 2. Мембрана
 3. Аэрозольная камера
 4. Кнопка для отделения аэрозольной камеры от корпуса прибора
 5. Вход для адаптера
 6. Батарейный отсек
 7. Мундштук
 8. Кнопка START/STOP
 9. Индикатор зарядки батареи: **зеленый цвет** – полная зарядка, **оранжевый** – батарея разряжается, **красный** – батарея полностью разряжена.
 10. Маска для взрослого стандартная
 11. Маска детская стандартная
 12. Сумка для хранения
 13. Батарейки типа АА
 14. Сетевой адаптер

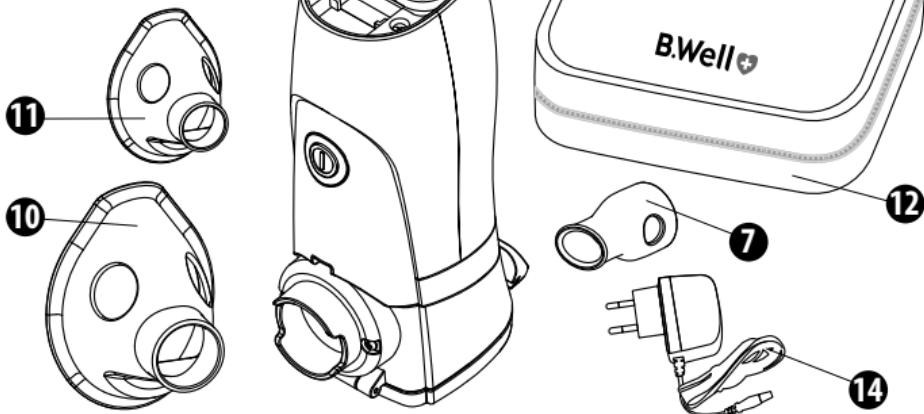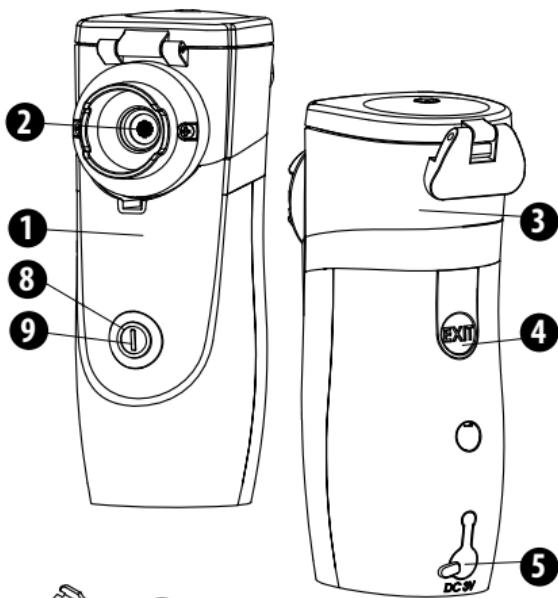

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

- Если вы используете прибор первый раз, откройте крышку батарейного отсека и вставьте две щелочные батарейки типа 1,5 AA с учетом обозначения полярности. Поменяйте батарейки, если прибор долго не использовался.
- Использованные батарейки утилизируйте согласно местным нормам утилизации.
- Возможно питание прибора от электросети. В этом случае Вы можете использовать соответствующий адаптер.
- Перед работой с ингалятором тщательно вымойте руки.
Очистите и продезинфицируйте аэрозольную камеру, мундштук, маску для лица (см. раздел «Очистка, уход и хранение»).
- Установите прибор на ровную поверхность
- Установите емкость аэрозольной камеры на корпус прибора. Легко нажмите до щелчка. Откройте крышку, откинув замок.
- Залейте необходимое, прописанное врачом лекарство и плотно закройте замок.
- Установите маску или мундштук. Перед использованием убедитесь, что все детали установлены должным образом и нажмите кнопку START/STOP.
- Проверьте, загорелся ли индикатор зарядки зеленым цветом.
- Если зарядка батарей неполная, то индикатор станет оранжевого цвета. Это означает, что прибор использовать можно, но батарейки скоро нужно будет заменить.

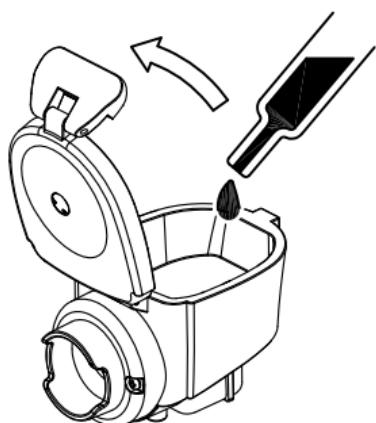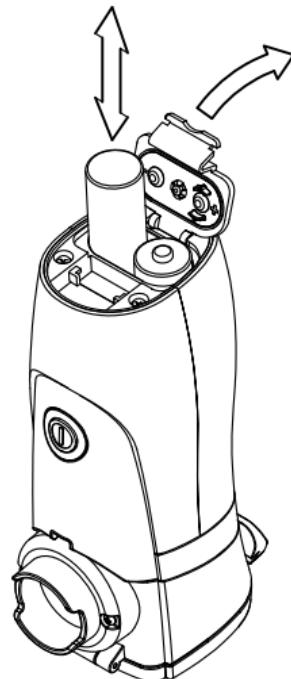


- Если индикатор будет красного цвета, это означает, что заряд батареи исчерпан, и прибор не может работать.
- При отсутствии лекарства в аэрозольной камере, индикатор станет красного цвета, и, предварительно подав 3 коротких световых сигнала, автоматически выключится.
- В приборе есть встроенный таймер, который автоматически отключает прибор после 20 минут работы. Если прибор не отключится через 20 минут, прекратите использование и обратитесь в сервисную службу за помощью.
- Во время использования, вы можете держать прибор под углом, но удостоверьтесь, что лекарство хорошо контактирует с мембраной.

⚠ Внимание! Прибор можно включать только при наличии препарата в аэрозольной камере!

⚠ Внимание! Вместимость емкости для лекарства составляет 8 мл. На емкости для лекарства нанесена насечка, которая обозначает уровень в 8 мл. Шкала отображает объем лекарства при установленной аэрозольной камере.

Ингаляция через мундштук:

- Установите мундштук на аэрозольной камере.
- Плотно обхватите мундштук губами.
- Делайте медленные глубокие вдохи через рот, выдохи через нос. Для повышения эффективности лечения следует ненадолго задерживать дыхание после вдоха.
Процедуру рекомендуется проводить в спокойном, расслабленном состоянии.
Дыхание должно быть ровным, не очень быстрым.
- При необходимости кратковременного прерывания ингаляции вынуть мундштук изо рта, а затем снова вставить его в рот.

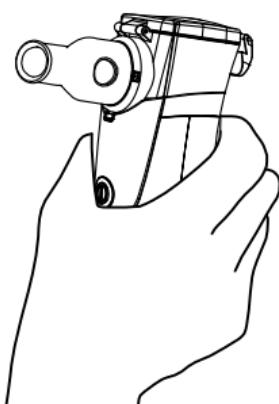


⚠ Внимание! При ингаляции с использованием мундштука в нем может оседать часть лекарственного препарата. В этом случае после процедуры необходимо выполнить следующие действия:

- Отсоединить мундштук от аэрозольной камеры, следя за тем, чтобы препарат не выливался.
- Слить препарат из мундштука обратно в емкость для лекарства.
- Продолжить процедуру с оставшимся препаратом.

Ингаляция через маску:

- Установите маску на аэрозольной камере в месте крепежа мембранны
- Несильно прижмите маску в области носа. Мaska должна плотно закрывать нос и рот без сильного давления на них.
- Делайте медленные и глубокие вдохи и выдохи через нос. Для повышения эффективности лечения следует ненадолго задерживать дыхание после вдоха. Процедуру рекомендуется проводить в спокойном, расслабленном состоянии. Дыхание должно быть ровным и не очень быстрым. При необходимости кратковременного прерывания ингаляции убрать маску с лица, а затем снова расположить ее в области носа и рта.

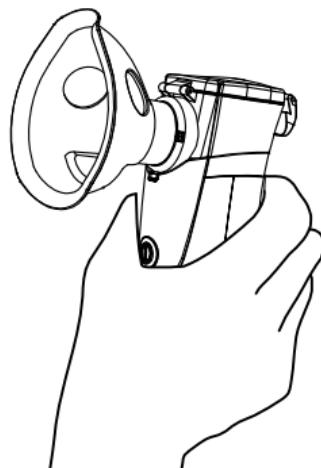

6. ОЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

Очистка перед первым использованием – дезинфекция

Перед первым использованием ингалятора все его детали и комплектующие должны быть продезинфицированы. Аэрозольная камера может быть дезинфицирована кипячением. Перед кипячением снимите аэрозольную камеру с корпуса прибора, нажав на кнопку **exit** на задней части корпуса прибора.

⚠ Внимание! Всегда используйте только очищенную воду.

Кипятить не более 4 минут. После кипячения стряхните избыточную воду из аэрозольной камеры и оставьте высыхать на бумажном полотенце.

Маски, мундштук, корпус прибора кипятить запрещается.

Для дезинфекции мундштук и маски вымыть под струей воды и на 10 минут поместить в дезинфицирующий раствор (спиртовой дезинфицирующий раствор или 3% раствор перекиси водорода), затем ополоснуть и полностью высушить.

Перед использованием прибор, его детали и комплектующие должны быть совершенно сухими. Прибор с комплектующими должен храниться в прохладном сухом месте в сумке, входящей в комплект.

Очистка после каждого использования

1. Отделите мундштук или маску от аэрозольной камеры. Слейте из них оставшееся лекарство.
2. Откройте аэрозольной камеру и слейте все оставшееся лекарство.
3. Влейте немного горячей воды в аэрозольную камеру и полностью закройте ее.
4. Нажмите кнопку **START** и оставьте работать 1-2 минуты для полного удаления всех остатков лекарства. Слейте оставшуюся воду из аэрозольной камеры.

После очистки аэрозольной камеры горячей водой рекомендуется такую же процедуру очистки провести с использование дистиллированной воды (без предварительного ее подогрева).


Отсоедините аэрозольную камеру от корпуса прибора.

5. Протрите поверхность прибора хлопчатобумажной тканью или ватным диском.

6. Почистите электроды на корпусе прибора и на нижней стороне аэрозольной камеры с помощью ватных палочек, убедитесь в нормальной электрической проводимости.
 - ⚠ Внимание!** Не используйте для очистки электродов бензин, растворитель и другие испаряющиеся жидкости.
 7. Очистите мундштук и маску чистой водой и оставьте все принадлежности высыхать на предварительно протертой спиртом поверхности.
- ⚠ Внимание!** Используйте новую аэрозольную камеру для различных болезней или пациентов, чтобы избежать распространения инфекций.
- ⚠ Внимание!** Чтобы избежать распространения инфекций, рекомендуется проводить дезинфекционную обработку частей прибора после каждого применения. Обязательно убедитесь, что прибор очищен полностью от лекарства. Остатки лекарства могут привести к поломке мембранны!

Запрещается вскрывать прибор. Ремонт данного прибора должен осуществляться только в центрах технического обслуживания, рекомендованных компанией B.Well.

Примечание: после 6 месяцев интенсивной эксплуатации аэрозольную камеру рекомендуется заменить.

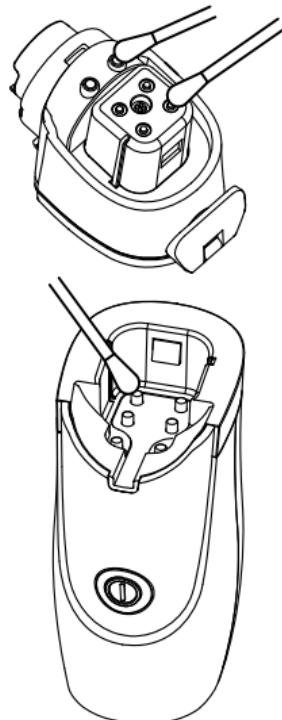

7. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей, внимательно изучите таблицу и попробуйте устранить ее самостоятельно. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр, указанный на гарантийном талоне.

Признак	Возможная причина	Решение
При включении прибор не работает.	<ol style="list-style-type: none"> Батарейки разрядились Батарейки установлены неправильно 	<ol style="list-style-type: none"> Если индикатор горит красным светом, батарейки разряжены. Замените батарейки Убедитесь, что при установке батареек соблюдена полярность
Аэрозоль не образуется совсем либо образуется в недостаточном количестве.	<ol style="list-style-type: none"> Недостаточное количество лекарства в лекарственной емкости Мембрана загрязнена остатками лекарства Мембрана покрыта лекарством или водой Ёмкость для лекарства установлена неправильно 	<ol style="list-style-type: none"> Залейте препарат в лекарственную емкость Почистите лекарственную емкость Удалите лекарство или воду с поверхности мембранны Снимите емкость, нажав кнопку EXIT на корпусе прибора, и установите ее правильно

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания:	2 алкалиновые батареи типа АА сетевой адаптер Вход: AC 100-240В ~ 50/60Гц 0.5А Выход: DC 3В == 1.4А Рекомендован адаптер AD-114C.
Условия эксплуатации: Относительная влажность:	температура: мин. 10° С, макс. 40° С 30 – 80%

Условия хранения:	температура: мин. -20° С, макс. 70° С
Относительная влажность:	менее 85%
Частота ультразвука:	103 – 123 кГц
Скорость распыления:	0,2 мл/мин – 1,0 мл/мин (в зависимости от применяемого лекарства)
Средний диаметр аэрозольных частиц:	менее 5 μm (микрон)
Емкость лекарственной камеры:	2 – 8 мл
Остаточный объем лекарства:	менее 0,15 мл
Время работы батарей:	минимум 1 час для 2 алкалиновых батарей
Время авто-отключения:	через 20 минут работы прибор отключится автоматически
Авто-отключение:	при отсутствии лекарства и заряда батарей
Уровень шума:	менее 30 db
Вес:	137 гр (без батареек)
Размеры прибора:	45 x 54 x 122 мм

Приведенные выше данные являются ориентировочными, и могут изменяться от физических свойств (температуры, вязкости, плотности) распыляемого вещества. Возможны изменения технических характеристик и дизайна прибора в целях их улучшения без предварительного уведомления.

Комплектация:

Наименование	WN-114 adult	WN-114 child
Ингалятор медицинский	1 шт.	1 шт.
Аэрозольная камера	1 шт.	1 шт.
Маска для взрослого стандартная	–	1 шт.
Маска детская стандартная	–	1 шт.
Мундштук	1 шт.	1 шт.
Сетевой адаптер	–	1 шт.
Батарейки типа АА	2 шт.	2 шт.
Сумка для хранения	1 шт.	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.	1 шт.

9. СЕРТИФИКАТЫ

Высокое качество прибора и комплектующих подтверждено документально:

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № РЗН 2014/1702 от 10.07.2017.

Декларации о соответствии.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание* изделия в течение 10 лет, и гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты приобретения на корпус прибора и 6 месяцев на аэрозольную камеру с сеткой-мембраной.

При обнаружении производственного дефекта в течение срока гарантии неисправный прибор будет отремонтирован, а в случае невозможности ремонта заменен бесплатно.

Гарантийные обязательства действительны только при полностью заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгового предприятия или печати технического обслуживания.

Гарантийное и бесплатное сервисное обслуживание не производится при наличии на корпусе прибора следов механического воздействия, вмятин, трещин, сколов и т.п., следов вскрытия корпуса, следов попыток ремонта вне авторизированного центра технического обслуживания, следов попадания влаги внутрь корпуса или воздействия агрессивных средств, а также в других случаях нарушения потребителем правил хранения, транспортировки и технической эксплуатации прибора, предусмотренных правилами, изложенными в инструкции по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на комплектующие, подверженные износу (мундштук, маски и др.), а также батареи и упаковку прибора.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие подключения к электросети через сетевые адаптеры, не рекомендованные компанией B. Well, а также вследствие перенапряжения в электросети.

* бесплатное сервисное обслуживание – устранение недостатков (дефектов) изделия возникших по вине производителя.

Информацию по техническому обслуживанию, как в рамках настоящей гарантии, так и платному, можно получить в авторизованном сервисно-консультационном пункте или по телефону бесплатной горячей линии по России **8-800-200-33-22**.

Срок службы приборов B.Well установлен не менее 10 лет. Учитывая высокое качество продукции B.Well, фактический срок службы приборов может значительно превышать официальный.

Политика компании B.Well предусматривает постоянное совершенствование продукции. В связи с этим компания оставляет за собой право вносить полные или частичные изменения в продукцию без предварительного уведомления и в соответствии с производственными требованиями.

Срок службы: мундштук, маска детская, маска для взрослого – 1 год.

Дата производства указана в серийном номере: первые две цифры – неделя производства, следующие две цифры – год производства.

Дата производства комплектующих, купленных отдельно от прибора, указана на стикере в номере партии LOT: первые две цифры – номер недели, две вторые цифры – последние цифры года производства.

Центральный сервисно-консультационный пункт B.Well в России

Москва, ЗАО «Альфа-Сервис»,
ул. Бехтерева д.27,
Тел. (495) 325-45-63

*Адреса сервисно-консультационных пунктов в Вашем городе Вы можете узнать по телефону бесплатной горячей линии 8 800 200-33-22
или на сайте компании «Альфа-Медика» www.alpha-medica.ru*

Расшифровка символов, применяемых на упаковке:



Знак соответствия



Обратитесь к инструкции по эксплуатации



Не выбрасывать вместе с бытовым мусором



Изделие типа BF



Класс защиты от поражения электрическим током
(II класс)



Сертификация CE
0123



Серийный номер



Номер партии



Модель

10°C
-40°C



ПРИМЕНЕНИЕ Применение: ограничение по температуре применения

-20°C
-70°C



ХРАНЕНИЕ Хранение: ограничение по температуре хранения



Производитель



Единый знак обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза

B.Well медициналық ингаляторы

Модель WN-114

Мазмұны

1. Кіріспе	20
2. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық	20
Электр тогының соққысын алу қаупі	23
3. Аспаптың суреті және оның негізгі бөлшектері	24
4. Аспапты жұмысқа дайындау	25
Мұштік арқылы ингаляциялар	26
Бетперде арқылы ингаляциялар	27
5. Тазалау, күту және сақтау	28
Алғашқы пайдаланардың алдында тазалау – заарсыздандыру	28
Әр пайдаланғаннан кейін тазалау	28
6. Ықтимал ақаулықтар кестесі	30
7. Техникалық сипаттамалары	31
8. Сертификаттар	32
9. Кепілдік міндеттемелер	32

1. КІРІСПЕ

Құрметті сатып алушы, Сізді B.Well компаниясының WN-114 медициналық ингаляторын (небулайзерін)* сатып алғаныңызбен құттықтаймыз.

Бұл аспаптың органдарының басқа ауруларын емдеу үшін қолданылады.

Аспаптың әрекет принципі дәрі-дәрмекті торша-жарғақты пайдаланып бүркітудің инновациялық технологиясына негізделген. Бұл аспапта аэрозольдік терапия үшін дәрі-дәрмектік құралды бүркіту препараттың ағыны торша-жарғақтағы өте ұсақ ойықтар арқылы өтетін кезде жүреді. Технология **төмен шуыл деңгейімен** сипатталады. Бүркітіш камераның ерекше конструкциясы ингаляцияны бүркіту үдерісі үшін нұксандысыз 45° С дейін еңіс бұрыштың астында жүргізуге мүмкіндік береді, бұл оны төсек тартып жатқан науқастар мен кішкентай балаларға ұйықтап жатқан кезде ингаляциялар жүргізу үшін ыңғайлыш етеді.

B.Well компаниясы осы аспаптың тек жоғары сапалы материалдардан жасалғанына және қолданыстағы ұлттық және халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетініне кепілдік береді. Небулайзер медициналық аспап болып табылады, сондықтан да оны тек Сіздің дәрігеріңіздің нұсқауларына сәйкес пайдалануға болады.

Аспапты пайдаланардан бұрын, нұсқаулықты мұқият зерделеп шығып, осы ұсыныстамаларды ұстануыңызды өтінеміз!

2. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Пайдалануды бастардың алдында нұсқаулықты мұқият зерделеп шығыңыз. Оны аспаптың бүкіл қызмет мерзімінің барысында сақтаңыз. Бұл аспап тек ингаляциялық терапияға арналған. Кез келген өзге қолдану бұрыс, демек қауіпті деңгейде саналады. Өндіруші аспапты бұрыс қолданудың салдарынан туындаған зақымдар үшін жауапкершілік көтермейді.

* бұдан әрі мәтін бойынша «ингалятор» және «небулайзер» деген сөздер тең дәрежелі болып саналады.

Небулайзерді пайдалану ережелері

B.Well WN-114 жарғақтық небулайзерінде небулайзерлік терапия үшін ұсынылатын дәрі-дәрмектік препараттардың бүкіл тізбесін қолдануға болады. Дәрі-дәрмектік құралдың типін, мөлшерін және енгізу режимін тек емдеуші дәрігер тағайындаі алады.

⚠ Назар аударыңыз! Небулайзерлік терапияға арналған препараттар ретінде тәмендегілерді қолдануға үзілді-кесілді тыбым салынады:

- құрамында жүзгін бөлшектер бар заттектер мен ерітінділер (қайнатпалар, суспензиялар, түнбалар және т.б.). Жүзгін бөлшектер рееспирабелді фракциялы бөлшектерге қарағанда айтарлықтай ірі. Оларды небулайзерде пайдалану денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін;
- құрамында майлар бар ерітінділер (соның ішінде эфир майлары). Майлардың бөлшектері тыныс жолдарына түскенде өте ұсақ таспалар түзеді және «майлы пневмониялар» деп аталатын пневмониялардың өрбу тәуекелін арттырады;
- ауамен, оттекпен және азоттың шала тотығымен әрекеттескен кезде онай тұтанатын от қауіпті анестезиялық қоспалар;
- ароматтық заттектер.

⚠ Назар аударыңыз!

- Пайдалануға рұқсат етілген ерітінділердің жарамдылық мерзімін мұқият қадағалаңыз. Жарамдылық мерзімі өтіп кеткен ерітінділерді пайдаланбаңыз.
- Жұқпалардың таралуынан сақ болу үшін, бір жиынтықтауыштарды алдын ала дезинфекциялаусыз түрлі пациенттердің пайдалануына жол берілмейді.
- Егер сіз жиынтықтауыштарды алғаш рет немесе ұзақ уақыт сақтағаннан кейін пайдалансаңыз, оларды тазалауды және дезинфекциялауды аспапты пайдалана бастағанға дейін жүргізу қажет.
- Жиынтықтауыштарды тазалауды және дезинфекциялауды аспапты пайдаланғаннан кейін әркез жүргізіп отыру қажет. Бөлшектердің тиісті түрде дезинфекцияланғанына және құрғатылғанына көз жеткізіңіз, содан кейін оларды таза жерде сақтаңыз.
- Небулайзер мен оның құрамдас бөліктерін әрдайым дәрі-дәрмектік және жуғыш заттектердің қалдықтарынан тазартып отырыңыз. Ешқашанда тазартқыш ерітіндіні камерада, мұштікте немесе бетпердеде қалдырмаңыз.

- Небулайзерді және оның құрауыштарын микротолқынды пеште, фенмен немесе басқа да тұрмыстық аспаптардың көмегімен кептіруге болмайды.
- Пайдаланған кезде небулайзердің үстіне көрпе, сұлғі және т.б. жаппаңыз.
- Аспапты балалардың қолы жетпейтін орында сақтаңыз. Аспаптың құрамында сәби үшін қауіпті ұсақ бөлшектер бар. Балаларға аспапты тек ересек адамдардың қарауымен пайдалануға болады.
- Аспапты зиянды булардың немесе ұшқыр заттектердің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Дәрі-дәрмекке арналған сыйымдыққа 8 мл-ден астам дәрі-дәрмек құймаңыз.
- Аспапты түсіріп алмаңыз және оны зақымдауға жол бермеңіз.
- Аспап тек адамның пайдалануы үшін макұлданған. Оны тек нысаналы мақсатында пайдаланыңыз.
- Аспапты ұнтақ түріндегі дәрі-дәрмектік препараттарды немесе қышқыл ортасы бар препараттарды бұркіту үшін пайдаланбаңыз. Суды бұркіту үшін пайдалануға болмайды. Сұйық ретінде тек физиологиялық ерітіндіні (натрий хлоридының изотоникалық ерітіндісін) пайдалану керек.
- Әр пайдаланғаннан кейін аспапты тазалауды жүргізу қажет, өйткені пайдаланылған препараттың қалдықтары қатып қалып, механизмді және торша-жарғақты бұлдируі мүмкін.
- Аспапты пайдаланардың алдында, ақаулықтардың және көзге көрінетін физикалық зақымдардың жоқтығына көз жеткізу қажет. Қандай да бір күмән болған кезде, аспапты пайдаланбаған жөн, үекілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе Ресейдегі 8-800-200-33-22 ақысызы жедел желі бойынша қоңырау шалу қажет.
- Ақаулық болған және/немесе қалыптан тыс жұмыс істеген жағдайда, аспапты өз күшіңізбен жөндеуге талпынбай, дереу өшіру қажет.
Кез келген жағдайларда жөндеу мәселелері бойынша үәкілетті сервистік орталыққа хабарласу керек.



Электр тогының соққысын алу қаупі.

- Аспап сұйықтың түсүінен қорғалмаған.
- Аспалты су қолмен ұстауға болмайды.
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде бүркігішті ағытпаңыз.
- Аспалты суға батырмаңыз.
- Қосулы тұрған аспалты қараусыз қалдыруға болмайды.
- Осы аспалты жөндеу тек B.Well компаниясы ұсынған техникалық қызмет көрсету орталықтарында жүзеге асырылуға тиіс.

 **Назар аударыңыз! Бұл аспап бүркігіш камерада дәрі-дәрмектік құрал жок, кезде аспалты автоматты түрде ажырататын бергішпен жарақталған.**



3. АСПАПТЫҢ СУРЕТИ ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛШЕКТЕРИ

1. Аспаптың корпусы
 2. Жарғақ
 3. Бүркігіш камера
 4. Бүркігіш камераны аспаптың корпусынан бөлектеуге арналған түймешік
 5. Адаптерге арналған кіріс
 6. Батареялар қуысы
 7. Мүштік
 8. START/STOP түймешігі
 9. Батарея зарядының индикаторы:
 жасыл түс – толық заряд,
 жалқын – батареяның заряды таусылуға жакын,
 қызыл – батареяның заряды толық таусылған.
 10. Ересек адамға арналған бетперде
 11. Балаға арналған бетперде
 12. Аспапқа арналған қоржын
 13. Батареялар – екі AA
 14. Адаптер

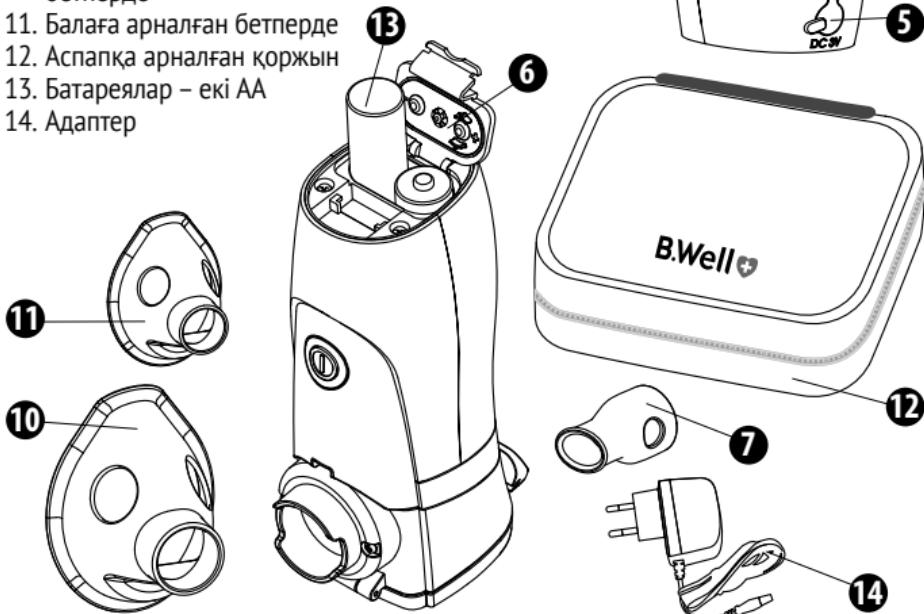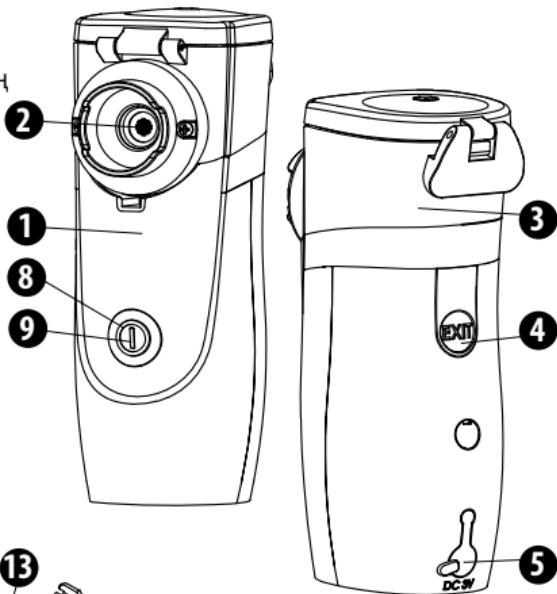

4. АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Егер сіз аспапты алғаш рет пайдаланатын болсаңыз, батареяла қуысының қақпағын ашып, полярлығын ескере отырып, екі 1,5 AA типті сілтілі батареяны салыңыз. Егер аспап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, батареяларды ауыстырыңыз.
- Пайдаланылған батареяларды жергілікті кәдеге жарату нормаларына сәйкес кәдеге жаратыңыз.
- Аспапты электр желісінен қоректендіруге болады. Ондай жағдайда, Сізге тиісті адаптерді пайдалануыңға болады.
- Ингалятормен жұмыс істердің алдында қолыңызды мұқият жуыңыз. Бүркігіш камераны, дәрі-дәрмекке арналған сыйымдықты, мұштікті, бетке арналған бетпердені тазартыңыз және зарарсыздандырыңыз («Тазарту, күтім жасау және сақтау» бөлімін қараңыз).
- Аспапты тегіс беттің үстіне орнатыңыз.
- Бүркігіш камераның сыйымдығын аспаптың корпусының үстіне орнатыңыз. Шырт еткенге дейін жеңіл басыңыз. Құлыпты айқарып, қақпақты ашыңыз.
- Дәрігер тағайындаған қажетті дәрі-дәрмекті күйіңіз да, құлыпты мықтап жабыңыз.
- Бетпердені немесе мұштікті орнатыңыз. Пайдаланардан бұрын барлық бөлшектердің тиісті түрде орнатылғанына көз жеткізіңіз де, START/STOP түймешігін басыңыз.
- Зарядтау индикаторының жасыл түспен жанғанын тексеріңіз.
- Егер батареялардың зарядының индикаторы толық болмаса, онда индикатордың түсі жалқынға айналады. Бұл аспапты

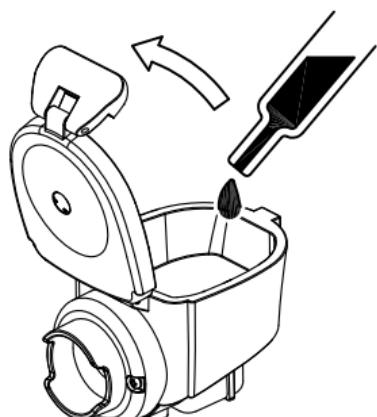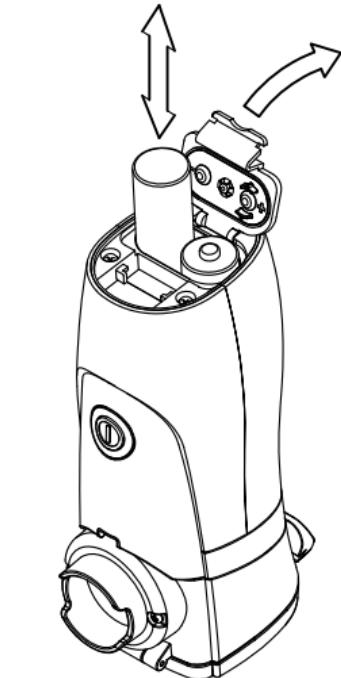

пайдалануға болатынын, бірақ батареяларды көп ұзамай ауыстыру керек болатынын білдіреді.

- Егер индикатордың түсі қызыл болса, бұл батареяның заряды таусылғанын және аспаптың жұмыс істей алмайтынын білдіреді.
- Бүркігіш камерада дәрі-дәрмек жоқ болған кезде, индикатордың түсі қызылға айналады да, алдын ала 3 қысқа жарық сигналын шығарып, автоматты түрде ажыратылады.
- Аспапта кірістіріп орнатылған таймер бар, ол 20 минут жұмыс істегеннен кейін аспапты автоматты түрде ажыратады. Егер аспап 20 минуттан соң ажыратылmasa, пайдалануды доғарып, сервистік қызметке көмек сұрап хабарласыңыз.
- Пайдаланған уақытта, сізге аспапты бұрыштап ұстауыңызға болады, бірақ дәрі-дәрмектің жарғаққа жақсы тиіп тұратынына көз жеткізіңіз.

⚠ Назар аударыңыз! Аспапты тек бүркігіш камерада препарат болған кезде қосуға болады!

⚠ Назар аударыңыз! Дәрі-дәрмекке арналған сыйымдықтың сыйымдылығы 8 мл-ді құрайды. Дәрі-дәрмекке арналған сыйымдыққа 8 мл деңгейді білдіретін кертпе салынған. Шәкіл бүркігіш камера орнатылған кездегі дәрі-дәрмектің көлемін көрсетеді.

Мұштік арқылы ингаляция:


- Мұштікті бүркігіш камераның үстіне орнатыңыз.
- Мұштікті еріндерізбен мықтап ұстаныз.
- Аузыңыз арқылы баяу терең тыныс алышыз, демінізді мұрын арқылы шығарыңыз.
Емдеудің тиімділігін арттыру үшін, демді ішке тартқаннан кейін тынысты сәл кідірту керек. Процедураны тыныш, жайбақат күйде жүргізген дұрыс. Тыныс біркелкі болуға, онша жылдам болмауға тиіс.
- Ингаляцияны аз уақытқа үзу қажет болған кезде мұштікті аузыңыздан шығарыңыз, содан кейін оны қайтадан аузыңызға салыңыз.



- ⚠ Назар аударыңыз!** Мұштікті пайдаланып ингаляция жасаған кезде дәрі-дәрмектік препараттың бір бөлігі оған шөгуі мүмкін. Ондай жағдайда, процедурадан кейін төмендегі әрекеттерді орындау қажет:
- Препараттың төгілмеуін қадағалап, мұштікті бүркігіш камерадан ағытыңыз.
 - Препаратты мұштіктен дәрі-дәрмекке арналған сыйымдыққа қайта құйыңыз.
 - Процедураны қалған препаратпен жалғастырыңыз.

Бетперде арқылы ингаляция:

- Бетпердені бүркігіш камераның үстіне жарғақ бекітілетін жерге орнатыңыз.
- Бетпердені мұрын тұсына ақырындан басыңыз. Бетперде мұрын мен ауызға қатты қысым түсірмей, оларды толық жауып тұруға тиіс.
- Мұрын арқылы баяу және терең дем тартып, дем шығарыңыз. Емдеудің тиімділігін арттыру үшін, демді ішке тартқаннан кейін тынысты сәл кідірту керек. Процедураны тыныш, жайбарақат күйде жүргізген дұрыс. Тыныс біркелкі болуға, онша жылдам болмауға тиіс. Ингаляцияны аз уақытқа үзу қажет болған кезде бетпердені беттіңізден алыңыз, содан кейін оны қайтадан мұрын мен ауыз тұсына орналастырыңыз.

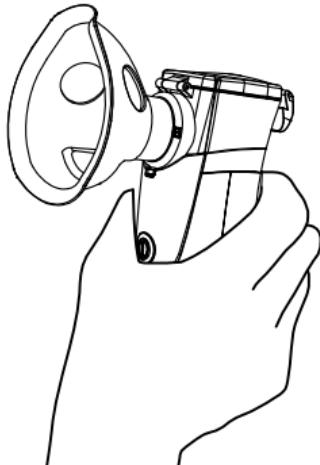

5. ТАЗАЛАУ, КҮТУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Алғаш пайдаланардың алдында тазалау – заарарсыздандыру.

Ингалиторды алғаш пайдаланардың алдында оның барлық бөлшектері мен жиынтықтауыштары заарарсыздандырылуға тиіс.

Бүркігіш камераны қайнату арқылы заарарсыздандыру болады. Қайнатардың алдында аспаптың корпусының артқы жағындағы EXIT түймешігін басып, бүркігіш камераны аспаптың корпусынан ағытып алыңыз. 10-30 минут қайнатқаннан кейін бүркігіш камерадағы артық суды сілкіп тастаңыз да, қағаз сүлгінің үстінде құрғау үшін қалдырыңыз.

Бетперделерді, мұштікті, аспаптың корпусын қайнатуға тыйым салынады. Мұштікті, өтпелікті және бетперделерді заарарсыздандыру үшін аққан судың астында жуып, 10 минутқа заарарсыздандырығыш ерітіндіге (спирттік заарарсыздандырығыш ерітіндіге немесе 3% сутек тотығына) салып қойыңыз, содан кейін саптамаларды шайып, толық құрғату қажет.

Пайдаланардың алдында аспап, оның бөлшектері мен жиынтықтауыштары әбден құрғақ болуға тиіс.

Аспап саптамаларымен бірге салқын құрғақ жерде жиынтықталымға кіретін қоржында сақталуға тиіс.

Әр пайдаланудан кейін тазалау

1. Мұштікті немесе бетпердені бүркігіш камерадан ағытыңыз. Оларда қалған дәрі-дәрмекті төгіп тастаңыз.
2. Бүркігіш камераны ашып, онда қалған дәрі-дәрмекті төгіп тастаңыз.
3. Бүркігіш камераның ішіне азғантай ыстық су құйып, оны толық жабыңыз.
4. Дәрі-дәрмектің барлық қалдығын кетіру үшін, START түймешігін басып, 1-2 минут жұмыс істеге үшін қоя тұрыңыз. Бүркігіш камерадан қалған суды төгіп тастаңыз. Бүркігіш камераны аспаптың корпусынан ағытыңыз.
5. Аспаптың бетін мақта-мата шүберекпен немесе мақта дискімен суртіңіз.
6. Аспаптың корпусындағы және бүркігіш камераның астыңы жағындағы электродтарды мақта таяқшаларын пайдаланып тазалаңыз да, электр тогын қалыпты өткіzetініне көз жеткізіңіз.

⚠ Назар аударыңыз! Электродтарды тазалау үшін бензинді, еріткішті және басқа буланатын сұйықтарды пайдаланбаңыз.


7. Бүркігіш камераны, мүштікті және бетпердені таза сүмен тазалап, алдын ала спиртпен сұртіп алынған беттің үстіне құрғатуға қойыңыз.

⚠ Назар аударыңыз! Жұқпалардың таралуынан сақтану үшін, әртүрлі аурулар немесе пациенттер үшін жаңа бүркігіш камераны пайдаланыңыз.

⚠ Назар аударыңыз! Жұқпалардың таралуынан сақтану үшін, әр қолданудан кейін аспаптың бөліктерін заарсыздандыратын өндөуді жүргізіп отырған дұрыс. Міндетті түрде аспаптың дәрі-дәрмектен толық тазартылғанына көз жеткізініз. Дәрі-дәрмектің қалдықтары жарғақтың сынуына әкеліп соғуы мүмкін!

Аспапты ашуға тыйым салыналы. Бұл аспапты жөндеу тек B.Well компаниясы ұсынған техникалық қызмет көрсету орталықтарында жүзеге асырылуға туіс.

Ескерім: 6 ай қарқынды іске пайдаланылғаннан кейін бүркігіш камераны ауыстырған дұрыс.

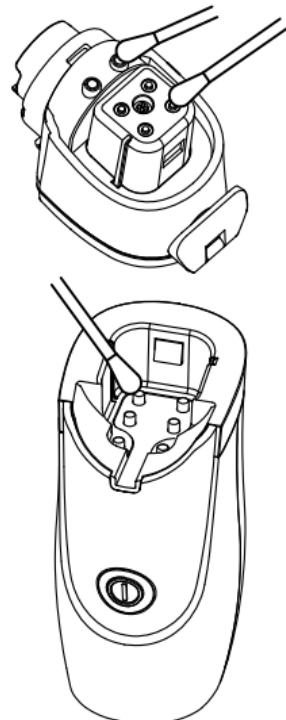

6. ҰІҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІ

Ақаулықтар туындаған жағдайда, кестені мүқият зерделеп шығып, оны өз бетінізben жоюға талпынып көріңіз. Егер проблема жойылмаса, кепілдік талонында көрсетілген сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Белгісі	Ұіқтимал себебі	Шешімі
Қосылған кезде аспап жұмыс істемейді.	<ol style="list-style-type: none"> Батареялардың заряды таусылған Батареялар дұрыс орнатылмаған 	<ol style="list-style-type: none"> Егер индикатор қызыл түспен жанып тұрса, батареялардың заряды таусылған. Батареяларды ауыстырыңыз Батареялар орнатылған кезде полярлықтың сақтағанына көз жеткізіңіз
Аэрозоль мұлдем түзілмейді, не болмаса жеткіліксіз көлемде түзіледі.	<ol style="list-style-type: none"> Дәрі-дәрмектік сыйымдықтағы дәрі-дәрмектің көлемі жеткіліксіз Жарғақ дәрі-дәрмектің қалдықтарымен ластанған Жарғаққа дәрі-дәрмек немесе су жүққан Дәрі-дәрмекке арналған сыйымдық дұрыс орнатылмаған 	<ol style="list-style-type: none"> Дәрі-дәрмектік сыйымдыққа препарат құйыныз Дәрі-дәрмектік сыйымдықты тазартыңыз Жарғақтың бетіндегі дәрі-дәрмекті немесе суды кетіріңіз Аспаптың корпусындағы EXIT түймешігін басып, сыйымдық шешіп алыңыз да, оны дұрыс орнатыңыз

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қоректендіру көзі:

АА типті 2 алкалин батарея
220 вольт желіден қоректендіру
адаптері (бөлнік сатып алынады).
AD-114C адаптері ұсынылады.

Іске пайдалану шарттары:

Салыстырмалы ылғалдылық:

температура: мин. 10°C, макс. 40°C
30 – 80%

Сақталу шарттары:

температура: мин. -20°C, макс. 70°C

Салыстырмалы ылғалдылық:

85%-дан кем

Ультрадыбыстың жиілігі:

103 – 123 кГц

Бүркіту жылдамдығы:

0,2 мл/мин – 1,0 мл/мин

(қолданылатын дәрі-дәрмекке қарай)

Аэрозольдік бөлшектердің

5 μm (микроннан) кем

орташа диаметрі:

2 – 8 мл

Дәрі-дәрмектік камераның

0,15 мл-ден кем

сыйымдылығы:

2 алкалин батарея үшін кем

Дәрі-дәрмектің қалдық көлемі:

дегенде 1 сағат

Батареялардың жұмыс уақыты:

20 минут жұмыс істеген соң аспап

Автоматты түрде ажыратылу уақыты:

автоматты түрде ажыратылады

Автоматты түрде ажыратылу:

дәрі-дәрмек пен батареялардың

Шуыл деңгейі:

жеткілікті заряды жоқ болған кезде

Салмағы:

30 db кем

Аспаптың мөлшерлері:

137 гр (батареяларсыз)

45 x 54 x 122 мм

Жиынтықталымы WN-114 child:

Медициналық ингалятор, Ересек адамға арналған бетперде, Балалар бетпердесі,

Бүркігіш камера, Мұштік, Желілік адаптер, Батареялар – 2 дана, Сақтауға

арналған қоржын, Қорапша, Кепілдік талоны, Іске пайдалану нұсқаулығы.

Жиынтықталымы WN-114 adult:

Медициналық ингалятор, Бүркігіш камера, Мұштік, Батареялар – 2 дана, Сақтауға

арналған қоржын, Қорапша, Кепілдік талоны, Іске пайдалану нұсқаулығы.

Жоғарыда берілген деректер бағдарлық болып табылады және бүркілеттін заттектің

физикалық сипаттарына (температурасына, тұтқырылығына, тығыздығына) байланысты

өзгеріп отыруы мүмкін. Аспаптың техникалық сипаттамалары мен дизайнын жақсарту

мақсатында, олар алдын ала құлақтандыруыз өзгеріп түсінілгенде мүмкін.

8. СЕРТИФИКАТТАР

Аспаптың және жиынтықтаушардың жоғары сапасы құжаттық түрде расталған:

РОСЗДРАВНАДЗОР куәлігі (№ РЗН 2014/1702 от 10.07.2017).

Ресей Госстандартының сәйкестік туралы декларациясы.

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Өндіруші бұйымға 10 жыл бойына ақысыз сервистік қызмет көрсетуді* және аспаптың корпусына сатып алғанда күннен бастап 2 жыл бойы және торшажарғақ бар бұркігіш камераға 6 ай бойы кепілдік міндеттемелерді қамтамасыз етеді.

Кепілдік мерзімінің ішінде өндірістік ақаутабылған жағдайда ақаулы аспап ақысыз жөнделеді, ал жөндеу мүмкін болмайтын жағдайда, ауыстырылады. Кепілдік міндеттемелер тек сауда кәсіпорнының немесе техникалық қызмет көрсету орталығының мөрі басылған түгелдей толтырылған кепілдік талоны болған жағдайда күшінде болады.

Кепілді және ақысыз сервистік қызмет көрсету аспаптың корпусында механикалық әсердің іздері, майырылымдар, жарықшалар, кетіктер және т.б. болған жағдайда; корпусты ашуға талпыныстардың іздері, үәкілетті техникалық қызмет көрсету орталығынан тыс жөндеуге талпыныстардың іздері болған жағдайда; корпусың ішіне су кіруідің немесе аппаратқа агрессивті орталардың әсерінің іздері болған жағдайда; тұтынушы пайдалану нұсқаулығында баяндалған ережелермен көзделген аспапты сақтау, тасымалдау және техникалық іске пайдалану ережелерін бұзған басқа жағдайларда жүргізілмейді.

Кепілдік тозуға бейім жиынтықтаушарға (мүштікке, бетпердеге және басқасына), сондай-ақ аспаптың батареялары мен қанталымына таралмайды. Кепілдік электр желісіне В.Well компаниясы ұсынбаған желілік адаптерлер арқылы қосылуудың салдарынан, сондай-ақ электр желісінің асқын кернеуінің салдарынан туындаған ақауларға таралмайды.

Осы кепілдіктің шенберінде, сондай-ақ ақылы техникалық жөндеу жөніндегі ақпаратты үәкілетті сервистік орталықта немесе Ресей бойынша ақысыщ шұғыл жөлінің **8-800-200-33-22** телефоны бойынша алуға болады.

* ақысыз сервистік қызмет көрсету – өндірушінің айыбынан туындаған бұйымның кемшіліктерін (акауларын) жою.

B.Well аспаптарының қызмет мерзімі кем дегенде 10 жыл болып белгіленеді. B.Well өнімдерінің жоғары сапасын ескергенде, аспаптардың іс жүзіндегі қызмет мерзімі ресми қызмет мерзімінен айтарлықтай асып кетуі мүмкін. B.Well компаниясының саясаты өнімдерді үнемі жетілдіруді көздейді. Осыған байланысты, компания алдын ала құлақтандырусыз және өндірістік талаптарға сәйкес өнімдеріне толық, немесе ішінара өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Шығарылған күні сериялық нөмірінде көрсетілген: алғашқы екі сан – шығарылған апта, келесі екі сан – шығарылған жылы.

B.Well Ресейдегі орталық сервистік қызметі

Мәскеу, «Альфа-Сервис» ЖАҚ,

Бектерев көшесі, 27-ші үй,

Тел. (495) 325-45-63

Өз қалаңыздағы сервистік шеберханалардың мекенжайларын Сізге ақысыз шұғыл желінің 8 800 200-33-22 телефоны бойынша немесе «Альфа-Медика» компаниясының www.alpha-medica.ru сайтынан білуінізге болады.

B.Well медициналық ингаляторы, модель WN-114

Лицензия иесінің мекенжайы: B.Well Limited, 758 Грейт Кэмбридж Роуд, Бизнес-орталық, Энфилд, Миддлсекс, EN 1 3PN, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі.

Тұтынушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және мекенжайы:

Қазақстан Республикасындағы өкілдігі:

ЖШС «DIOMED», Алматы, Чайковский көшесі, 22-ші үй, 211-ші офис
тел.: +7 (727) 233 57 21, факс: +7 (727) 273 60 06

Қаптамада қолданылатын символдардың мазмұнын ашу:



Ресей Госстандартының сәйкестік туралы мағлұмдамасы



Пайдалану нұсқаулығын қараңыз



Осы құрылғы түрмистық қалдықтарға жатпайды және оны түрмистық қоқыспен бірге тастауға болмайды



BF типті бүйім



Қорғау сыныбы II



Өнім ЕО директиваларының негізгі талаптарына және Еуропалық Одақтың үйлестірілген стандарттарына сәйкес, сондай-ақ өнім директиваларға сәйкестігін бағалау рәсімінен өткен




Сериялық нөмірде



Партия нөмірі



Модель

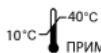

Жұмыс температурасы мен ылғалдылығы

ПРИМЕНЕНИЕ



Сақтау температурасы мен ылғалдылығы

ХРАНЕНИЕ



Өндіруші



Кеден одағына мүше мемлекеттердің нарығында өнімдердің айналымының бірыңғай белгісі



С заботой о каждом

 **B.Well Swiss AG**

Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

Производитель:

Би.Велл Свисс АГ

Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

Место производства:

OK Биотек Ко., Лтд., 4F-1, № 83, секция 2,
ГонгДао Роуд №5, Синьчжу Сити 300, Тайвань

Сделано в Тайване

www.bwell-swiss.ch