

# КАТЕТЕР ФОЛЕЯ

стандартный 2-х ходовой (Ch 6 - Ch 30)  
 женский 2-х ходовой (Ch 12 - Ch 22)  
 стандартный 3-х ходовой (Ch 16 - Ch 26)

**Предназначен для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций**

- 3-х ходовой катетер предназначен для дополнительных инстилляций
- изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом
- общая длина катетера: стандартный Ch 6 - Ch 10 – 280 мм; Ch 12 - Ch 30 – 400 мм; женский – 260 мм
- закрытый конец, 2 боковых отверстия
- объем баллона: размер Ch 6 - Ch 10 от 3 до 5 куб. см  
 размер Ch 12 - Ch 30 5 - 10/30 куб. см
- катетер Фолея детский (Ch 6 - Ch 10) имеет проводник
- стерилизован оксидом этилена



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- только для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- утилизация и обработка катетера в установленном порядке

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- надеть перчатки
- взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу (4-5 см)

По шкале Шарьера Ch/Fr	Внутренний диаметр I.D (мм)	Внешний диаметр O.D (мм)	Объем баллона, мл/куб.см	Цвет
6	1,1	2,0	3 - 5	розовый
8	1,7	2,7	3 - 5	черный
12	2,8	4,0	3 - 5	белый
14	3,3	4,7	5 - 10/30	зеленый
16	3,8	5,3	5 - 10/30	оранжевый
18	4,5	6,0	5 - 10/30	красный
20	5,1	6,7	5 - 10/30	желтый
22	5,6	7,3	5 - 10/30	фиолетовый
24	6,2	8,0	5 - 10/30	синий
26	6,9	8,7	5 - 10/30	розовый
28	7,6	9,7	5 - 10/30	коричневый
30	8,3	10,0	5 - 10/30	серый

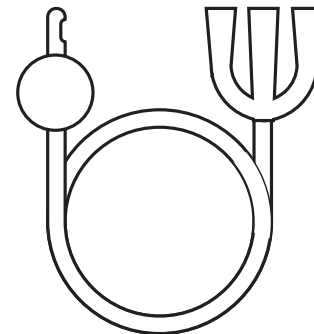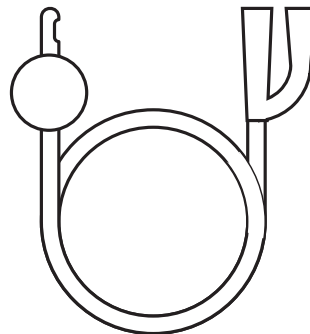

- свободный конец катетера захватить между 4-5 пальцами правой руки
- обработать вводимый конец катетера смазкой на водной основе
- обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
- свободный конец опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
- шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема (5мл. или 30 мл.) используя дистиллированную воду или физиологический раствор
- по окончании выведения мочи шприцем убрать дистиллированную воду или физиологический раствор из фиксирующего баллона
- катетер извлечь, нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки
- промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном

**ВНИМАНИЕ!** При затруднении извлечения катетера вследствие невозможности аспирации дистиллированной воды или физиологического раствора из баллона катетера необходимо произвести пункцию иглой, сделать микронадрез ниже уровня клапана катетера или полностью отрезать клапан. Это способствует снижению давления в фиксирующем баллоне, и позволяет беспрепятственно извлечь катетер

REF. Каталогный номер  
 MFD Дата производства  
 EXP Использовать до  
 LOT Номер партии



**STERILE EO**

**NON TOXIC**

**PYROGEN FREE**

**PHTHALATE FREE**



Регистрационное удостоверение  
 № ФСЗ 2008/02858 от 19.11.2008

Производитель:  
 "Апексмед Интернэшнл Б.В."  
 Кейзерсграхт, 62-64, 1015 CS,  
 Амстердам, Нидерланды

Для одноразового применения

Стерилизовано оксидом этилена

Не токсично

Апирогенно

Без фталатов

Смотрите инструкцию



ИМ15



1023