

КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ

Предназначен для катетеризации мочевого пузыря

- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
- длина 18±2 см, закрытый конец, 2 боковых отверстия
- стерилизован оксидом этилена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- надеть перчатки
- взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу (4-5см)
- свободный конец катетера захватить между 4 и 5 пальцами правой руки, смочить вводимый конец катетера в стерильном глицерине или стерильном вазелиновом масле
- обработать отверстие мочеиспускательного канала раствором фурациллина
- свободный конец опустить в ёмкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- соблюдая правила асептики, ввести катетер в отверстие мочеиспускательного канала до появления мочи
- закрепить катетер с помощью лейкопластыря или тесьмы
- по окончании выведения мочи катетер извлечь (нажав при этом на надлобковую область ладонью левой руки)
- промокнуть отверстие уретры стерильным тампоном
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке

По шкале Шарьера Ch/Fr	Внутренний диаметр I.D. (мм)	Внешний диаметр O.D. (мм)	Цвет
6	1,1	2,0	бирюзовый
8	1,7	2,7	голубой
10	2,3	3,3	черный
12	2,8	4,0	белый
14	3,3	4,7	зеленый
16	3,8	5,3	оранжевый
18	4,5	6,0	красный
20	5,1	6,7	желтый

REF. Каталожный номер

MFD Дата производства

EXP Использовать до

LOT Номер партии

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена

NON TOXIC

Не токсично

PYROGEN FREE

Апирогенно



IM15



1023

«АПЕКСМЕД ИНТЕРНЭШНЛ Б.В.»
 Кейзерсграхт 62-64, 1015 CS,
 Амстердам, Нидерланды

ПУ № ФСЗ 2008/02858 от 19.11.2008



Смотрите инструкцию



Для одноразового использования